

GMP
ISO9001
ISO14001
ISO13485
CERTIFIED

PIHSIANG®

SHOPRIDER®

MODEL: **TE-888NR**

(PATENTED)

PIHSIANG MACHINERY MFG. CO., LTD.

NO.108, HSIN-HE ROAD, HSIN-FENG HSIANG 304
HSINCHU COUNTY, TAIWAN

適用車型(MODEL)：

[illegible]

<FRONT PAGE=
TE-888NR

目 錄
TABLE OF CONTENTS
ILLUSTRATION

FIGURE 1	FRONT CHASSIS ASSEMBLY-----	前車架總成-----	P 1
FIGURE 2	REAR CHASSIS ASSEMBLY-----	後車架總成-----	P 4
FIGURE 3	DRIVE-TRAIN ASSEMBLY-----	馬達剎車變速箱總成-----	P 7
FIGURE 4	MOTOR ASSEMBLY-----	馬達總成-----	P 9
FIGURE 5	REAR WHEEL ASSEMBLY-----	後輪總成-----	P 11
FIGURE 6	FRONT AXLE ASSEMBLY-----	導向輪總成-----	P 13
FIGURE 7	CONNECTING ROD ASSEMBLY-----	導向連桿總成-----	P 16
FIGURE 8	FRONT WHEEL ASSEMBLY-----	前輪總成-----	P 18
FIGURE 9	HEAD LIGHT ASSEMBLY-----	前燈總成-----	P 20
FIGURE 10	HANDLE BAR + HAND GRIP ASSEMBLY-----	T型把手+握把套 總成-----	P 22
FIGURE 11	HANDLE BAR JOINT BASE ASSEMBLY-----	把手連接座總成-----	P 24
FIGURE 12	SWIVEL SEAT, ADAPTOR ASSEMBLY-----	旋轉-座台，支撐座總成-----	P 26
FIGURE 13	SEAT, ARM ASSEMBLY-----	座椅扶手總成-----	P 28
FIGURE 14	FRONT CHASSIS COVER ASSEMBLY-----	前蓋板總成-----	P 30
FIGURE 15	REAR CHASSIS COVER ASSEMBLY-----	後蓋板總成-----	P 32
FIGURE 16	HANDLE BAR COVER ASSEMBLY-----	把手蓋總成-----	P 35
FIGURE 17	REAR TILLER COVER ASSEMBLY-----	把手下蓋總成-----	P 38
FIGURE 18	UPPER CONTROLLER ASSEMBLY-----	上控制總成-----	P 40
FIGURE 19	HANDLE BAR ASSEMBLY-----	把手總成-----	P 43
FIGURE 20	MAIN CONTROL BOX ASS'Y-----	下控制總成(T把)-----	P 45
FIGURE 21	W/BATTERY KIT-----	加電瓶模組-----	P 48
FIGURE 22	CONTROL AND BATTERY WIRING ILLUSTRATION-----	控制及電瓶導線總成-----	P 50
	APPENDIX(1)-----	附錄(1)-----	P 52



圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
1	-----		Front chaaais assembly		前車架總成
1-1	102101-80102-A2	1	Front chassis assembly	888ND#1	前車架總成/888ND#1(A2)
			-----*-----		
1-2	5001-08035-210	2	Hex head screw	M8*P1.25*35L,Multicolored Galvanized	外六角螺栓/M8*P1.25*35L (五彩)
1-3	5011-08013-200	2	Nut	M8*P1.25*13,Multicolored Galvanized	六角螺帽/M8*P1.25*13邊 (五彩)
1-4	5022-08013-210	2	Spring washer	φ 8*13,Multicolored Galvanized	彈簧墊圈/ φ 8*13 (五彩)
			-----*-----		
1-5	101801-88100	1	Front axle assembly	888	前輪橫樑總成/888(電著)
1-6	5021-12021-210	4	Washer	φ 12*21*0.5t,Multicolored Galvanized	平墊圈/ φ 12*21*0.5t (五彩)
1-7	5014-12019-210	1	Self-lock nut	M12*P1.25*19,Multicolored Galvanized	防鬆螺帽/M12*P1.25*19邊 (五彩)
1-8	5023-03018-110	1	Split pin	M2*18L,PI03018B,Zinc Galvanized	開口銷/M2*18L (PI03018B)
			-----*-----		
1-9	202901-88100	1	Front bumper	Round	前保險桿/環型
1-10	102906-88100	1	Front cover support bracket assembly	888,A194-1	前蓋撐片總成(加工)/888 (A194-1)
1-11	4001194-01	1	Front cover support plate	A194-1	前蓋撐片/A194-1
1-12	209934-88100	1	U shape strap	5.5*8.5mm	U型條/5.5*8.5mm
1-13	5001-08020-210	2	Hex head screw	M8*P1.25*20L,Multicolored Galvanized	外六角螺栓/M8*P1.25*20L (五彩)
1-14	5021-08022-210	2	Washer	φ 8*22*2t,Multicolored Galvanized	平墊圈/ φ 8*22*2t (五彩)
1-15	5012-08013-200	2	Nylon Lock Nut	M8*P1.25*13 7.8t,Multicolored Galvanized	尼龍螺帽/M8*P1.25*13邊7.8t(五彩)
			-----*-----		
1-16	5001-06030-210	2	Hex head screw	M6*P1.0*30L,Multicolored Galvanized	外六角螺栓/M6*P1.0*30L (五彩)
1-17	5011-06010-200	4	Nut	M6*P1.0*10*5L,Multicolored Galvanized	六角螺帽/M6*P1.0*10邊*5L (五彩)
1-18	5021-06018-210	4	Washer	φ 6*18*1t,Multicolored Galvanized	平墊圈/ φ 6*18*1t (五彩)
1-19	5022-06010-210	2	Spring washer	φ 6*10,Multicolored Galvanized	彈簧墊圈/ φ 6*10 (五彩)

圖 號 FIG. & INDEX NO.	件 號 PART NO.	單位用量 UNIT PER ASSY.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
			-----*-----		
1-20	5022-08013-210	2	Spring washer	φ 8*13,Multicolored Galvanized	彈簧墊圈/ φ 8*13 (五彩)
1-21	5011-08013-200	2	Nut	M8*P1.25*13,Multicolored Galvanized	六角螺帽/M8*P1.25*13邊 (五彩)
1-22	5001-08030-210	2	Hex head screw	M8*P1.25*30L,Multicolored Galvanized	外六角螺栓/M8*P1.25*30L (五彩)
			-----*-----		
1-23	505201-01200-50	1	cable Tie	CV-120B	束帶/CV-120B
1-24	202922-00102	1	Connecting pin	φ 7.85,With two loops	安全銷(含鍊條16.5L)/ φ 7.85(二環)
1-A	-----	REF(1)	Chain		鐵鍊條
			-----*-----		
1-25	5008-08016-210-A2	1	Tighten Knob	M8*P1.25*17L,Multicolored Galvanized, A2	星型螺栓/M8*P1.25*17L全牙,五彩(A2)
1-26	301174-07-A2	1	Warning sticker	N74-7-A2	警告貼紙/N74-7-A2
			-----*-----		
1-27	202922-88205	1	Connecting pin	787N	附鎖安全銷/787N
1-28	301123-26-A2	1	Warning sticker	N23-26-A2	警告貼紙/N23-26-A2

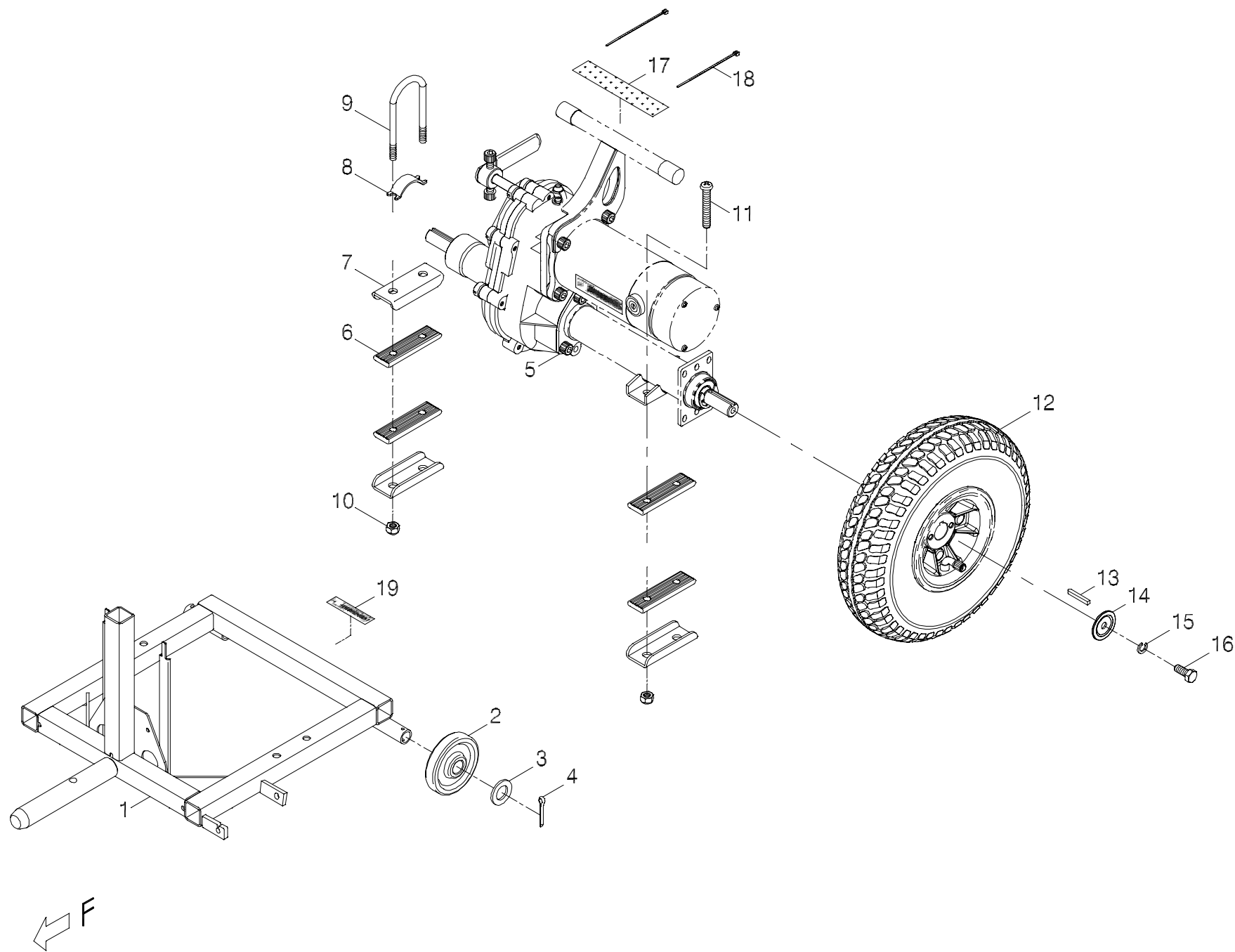


FIG.2

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
2	-----		Rear chassis assembly		後車架總成
2-1	102201-88200	1	Rear chassis assembly	888NB	後車架總成/888NB
			-----*-----		
2-2	209928-88100	2	anti-tip wheel	3	防傾輪/3"
2-3	4001305-00	2	Washer	A305, ϕ 17.5*30*2.6t	平墊圈/A305 (ϕ 17.5*30*2.6t)
2-4	5023-03025-210	2	Split pin	M3*25L,Multicolored Galvanized	開口銷/M3*25L (五彩)
			-----*-----		
2-5	-----	REF(1)	Drive-train assembly		馬達剎車變速箱總成
			-----*-----		
2-6	209909-88100	4	Rubber		減震膠片(二孔)
2-7	4001168-00	3	Bracket	A168	固定片/A168
2-8	4001192-00	1	Bracket	A192	弧形片/A192
2-9	4003210-01	1	Screw	C210-1	U型螺栓/C210-1
2-10	5012-08013-200	4	Nylon Lock Nut	M8*P1.25*13 7.8t,Multicolored Galvanized	尼龍螺帽/M8*P1.25*13邊7.8t(五彩)
2-11	5005-08050-210	2	Screw	M8*P1.25*50L,Multicolored Galvanized	十字圓頭螺栓/M8*P1.25*50L (五彩)
			-----*-----		
2-12	-----	REF(2)	Rear wheel assembly		後輪總成
2-13	505301-00505-02	2	Shaft key mini motor	5*5*35	單頭圓鍵/5*5*35
2-14	4001329-00	2	Washer	A329	平墊圈/A329
2-15	5022-08013-210	2	Spring washer	ϕ 8*13,Multicolored Galvanized	彈簧墊圈/ ϕ 8*13 (五彩)
2-16	5001-08020-440	2	Hex head screw	M8*P1.25*20L,SUS304	外六角鋼栓/M8*P1.25*20L SUS304
			-----*-----		
2-17	203103-66500	REF(1)	Velcro	25W*25M,Hook	自黏扣帶(勾面)/25W*25M
2-18	505201-00940-50	2	cable Tie	CV-094B	束帶/CV-094B

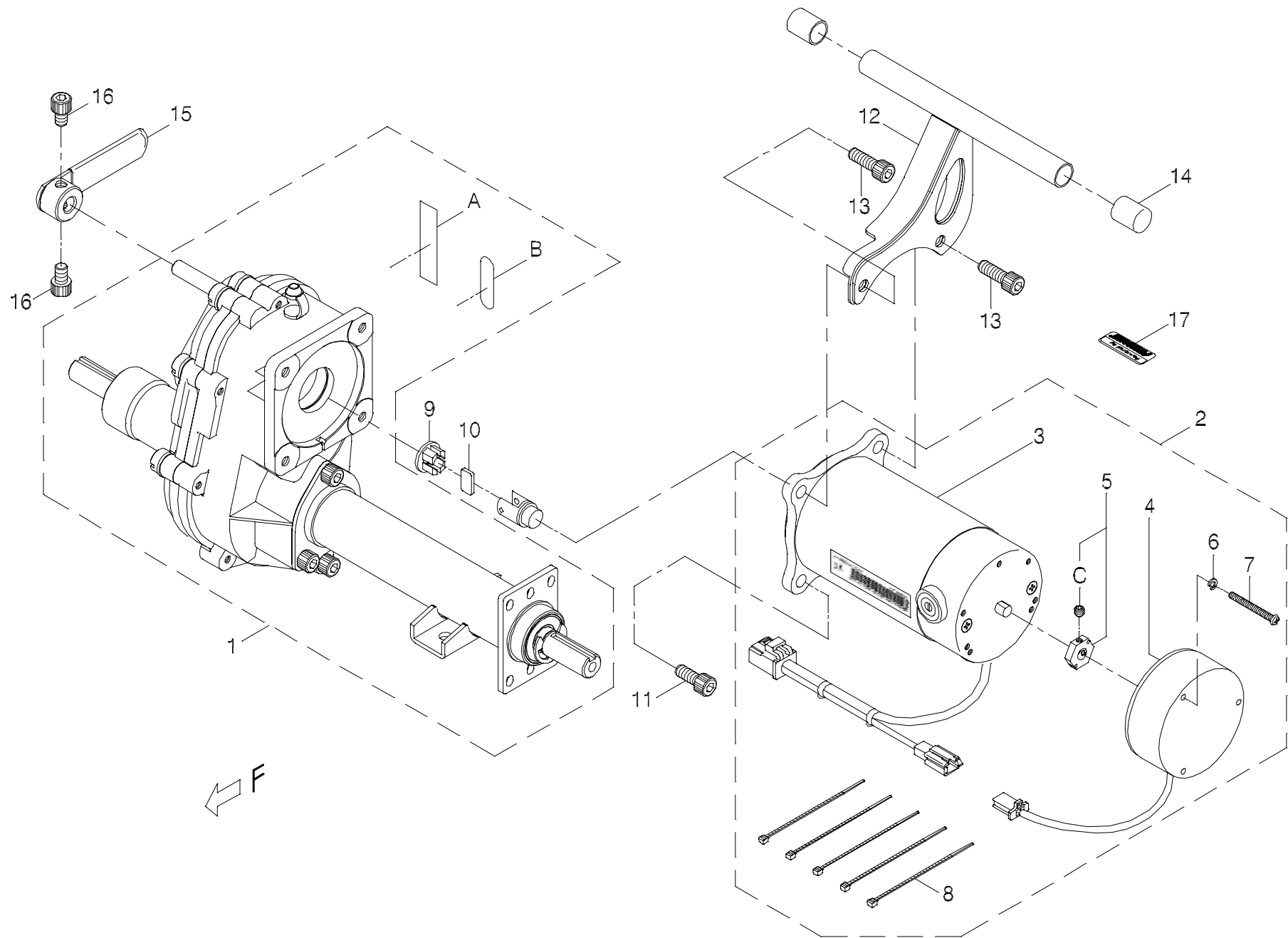


FIG.3

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
3	100001-88106	1	Drive-train assembly	8MNW-2,#6,888NTBG	馬達剎車變速箱總成/8MNW-2+(#6)+888NTBG(無電線勾片)
3-1	100401-88103-A4	1	Transaxle assembly	888NTBG(#1-2),Black (A4)	變速箱總成/888NTBG(#1-2),黑色(A4)
3-A	-----	REF(1)	Decal		條碼貼紙
3-B	301174-09	REF(1)	Warning sticker	N74-9	警告專利貼紙/N74-9
3-2	100101-88106	1	Motor and brake assembly	8MNW-2,#6	馬達剎車總成/8MNW-2+#6(管制)
3-3	1302-00101-02-A2	1	Motor assembly	8MNW-2,Black	馬達(總成)/8MNW-2/(管制)黑色(A2)
3-4	100309-88100	1	Electromagnetic brake assembly		電磁剎車總成#6
3-5	200301-66400	1	Disc brake driving axle	#1, ϕ 8*19.1*6L	剎車六角軸套/#1 (ϕ 8*對邊19.1*6L)
3-C	-----	REF(2)	Nylok socket screw		耐落無頭螺栓
3-6	5022-04007-210	3	Spring washer	ϕ 4*7*1.25t,Multicolored Galvanized	彈簧墊圈/ ϕ 4*7*1.25t (五彩)
3-7	5005-04040-210	3	Screw	M4*P0.7*40L,Multicolored Galvanized	十字圓頭螺栓/M4*P0.7*40L (五彩) 全牙
3-8	505201-00900-50	5	cable Tie	YJ-90,Black	束帶/YJ-90(黑色)
3-9	200904-88100	1	Bushing		變速箱連接襯套
3-10	200905-88100	1	Plate		變速箱連接片
3-11	5002-08020-220	2	CAP HEAD ALLEN SCREW	M8*P1.25*20L,Multicolored Galvanized	圓頭內六角鋼栓/M8*P1.25*20L (五彩)
3-12	100901-88100	1	Rear cover support bracket	888	後蓋支撐座總成/888
3-13	5002-08025-220	2	CAP HEAD ALLEN SCREW	M8*P1.25*25L,Multicolored Galvanized	圓頭內六角鋼栓/M8*P1.25*25L (五彩)
3-14	200903-88100	2	Rubber cover for transaxle	Black	圓管端套/黑
3-15	200902-88100	1	Free wheel handle	100L	離合器拉柄/100L
3-16	5002-08012-220	2	CAP HEAD ALLEN SCREW	M8*P1.25*12L,Multicolored Galvanized	圓頭內六角鋼栓/M8*P1.25*12L (五彩)
3-17	301179-04	1	Instruction sticker	N79-4	指示貼紙(40*15.5)/N79-4(Powered by PIHSIANG)

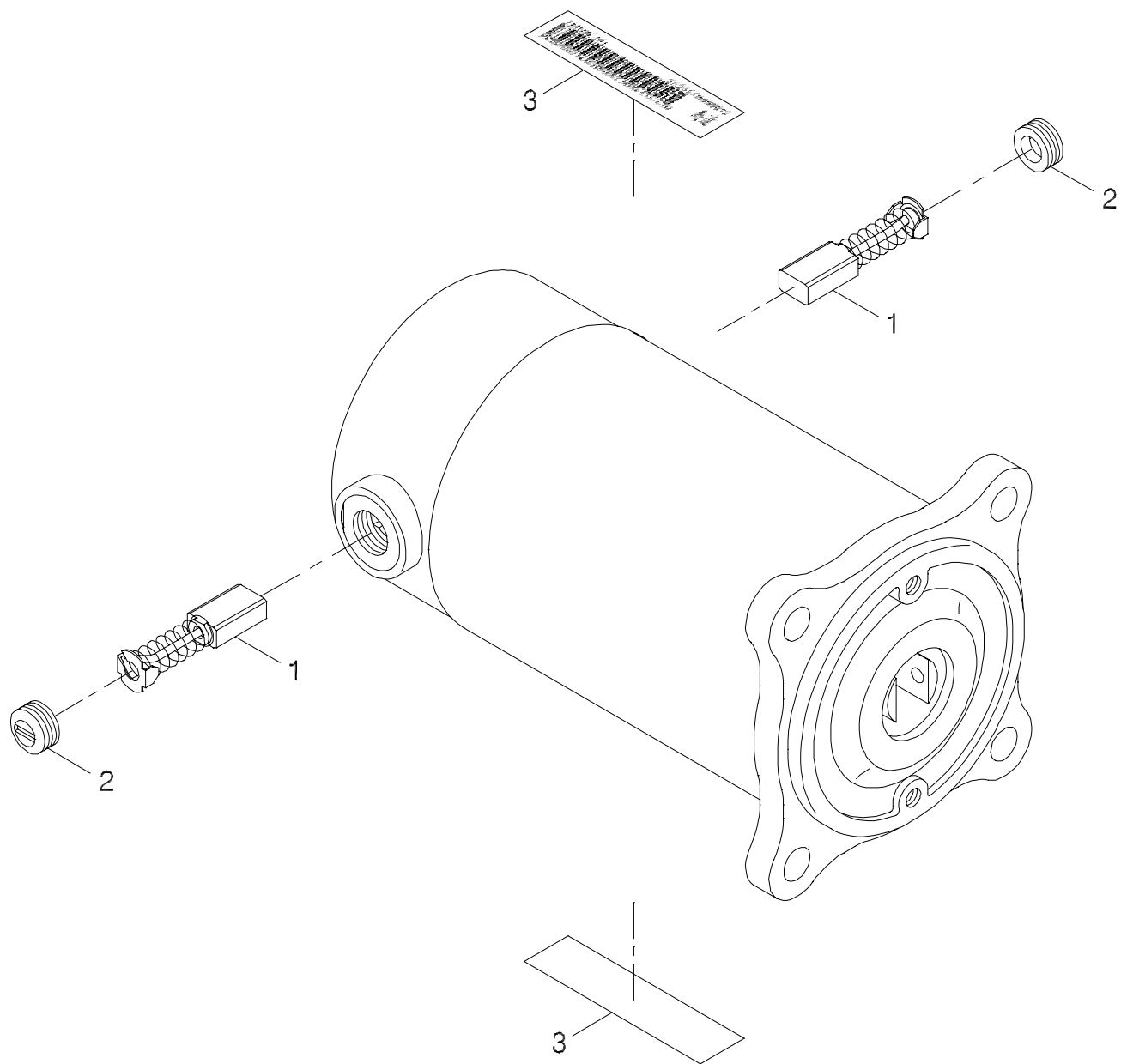


FIG.4

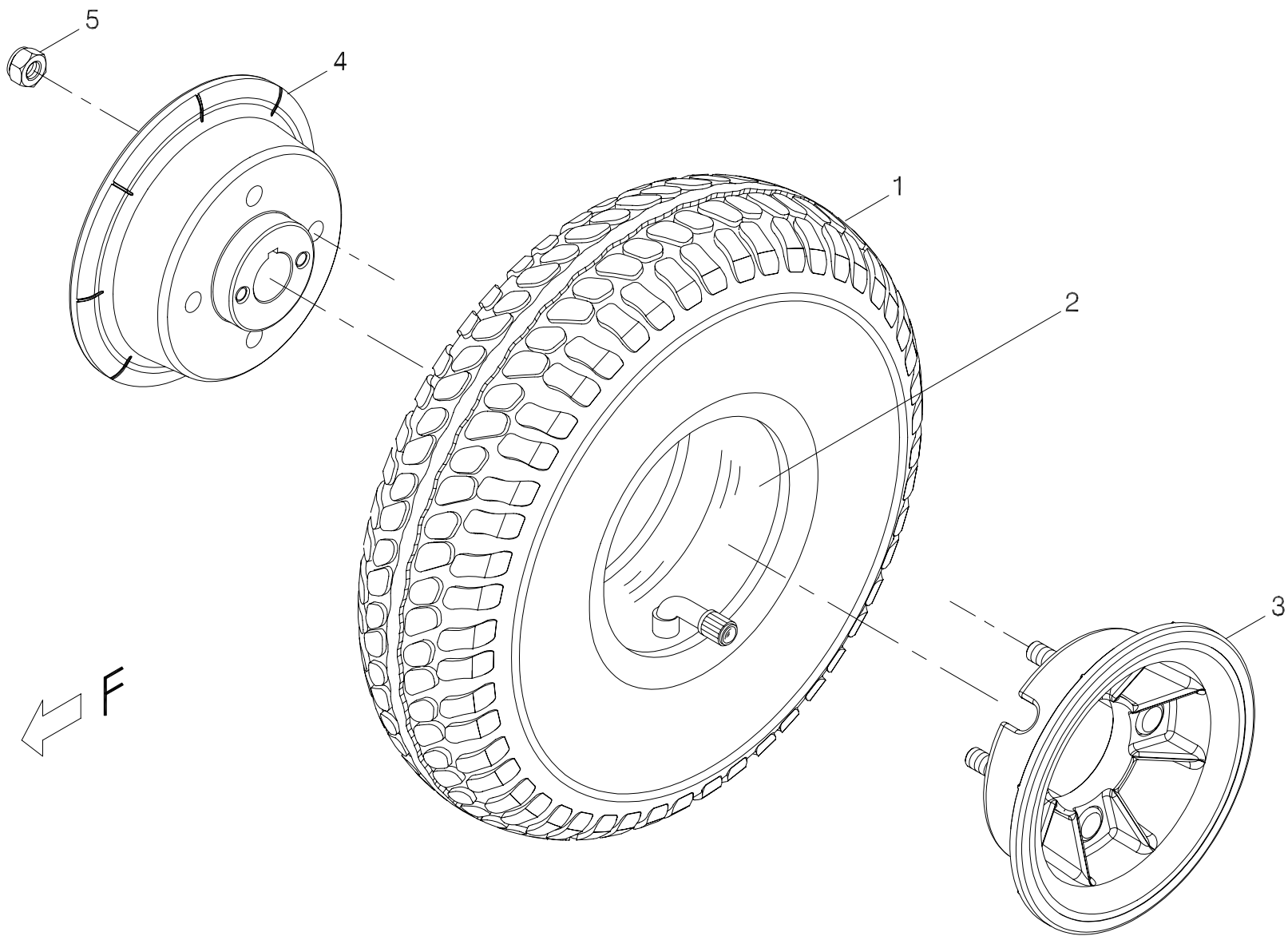


FIG.5

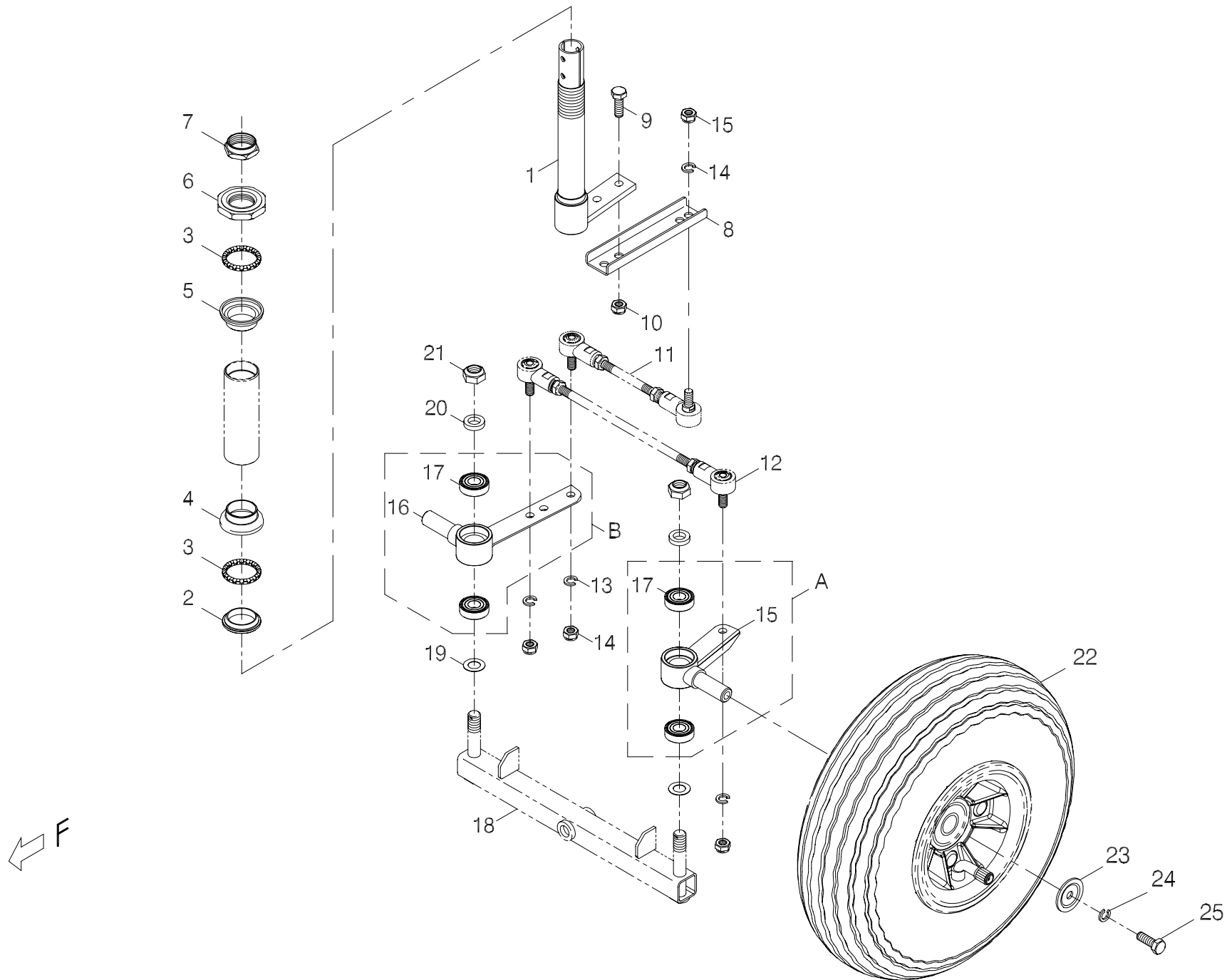


FIG.6

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
6	-----		Front axle assembly		導向輪總成
6-1	101501-88100	1	Steering shaft assembly	888	操向桿總成/888
			-----*-----		
6-2	201401-88200	1	Bearing bushing	φ 27	軸承座/ φ 27
6-3	201402-88200	2	Steering Bearings	5/32*16	軸承/5/32"*16
6-4	201403-88200	1	Bearing housing	φ 30	珠碗(下)/ φ 30
6-5	201404-88200	1	Bearing housing	φ 30	珠碗(上)/ φ 30
6-6	201405-88200	1	Bearing bushing	Large octangle	軸承襯套/大八角
6-7	201406-88200	1	Steering Head Nut	Dia 22.2	軸承固定螺帽/ φ 22.2
			-----*-----		
6-8	4001035-00	1	U Type connecting plate	A35	U型連接片/A35
6-9	5001-08020-210	2	Hex head screw	M8*P1.25*20L,Multicolored Galvanized	外六角螺栓/M8*P1.25*20L (五彩)
6-10	5012-08013-200	2	Nylon Lock Nut	M8*P1.25*13 7.8t,Multicolored Galvanized	尼龍螺帽/M8*P1.25*13邊7.8t(五彩)
6-11	-----	REF(1)	Connecting rod assembly (short)		導向連桿總成(短)
6-12	-----	REF(1)	Connecting rod assembly (long)		導向連桿總成(長)
6-13	5022-08013-210	4	Spring washer	φ 8*13,Multicolored Galvanized	彈簧墊圈/ φ 8*13 (五彩)
6-14	5012-08013-200	4	Nylon Lock Nut	M8*P1.25*13 7.8t,Multicolored Galvanized	尼龍螺帽/M8*P1.25*13邊7.8t(五彩)
			-----*-----		
6-A	102903-88100	1	Front wheel axle assembly	Left,Short	前輪軸總成(左)/短
6-15	202902-88101	1	Front wheel axle	Short-FCD,Black,Left	前輪軸(左)/短-FCD(黑)
6-17	505101-60012-01	2	Ball bearing	#6001zz,NBN	滾珠軸承/#6001zz (NBN)
			-----*-----		
6-B	102904-88100	1	Front wheel axle assembly	Right,Long	前輪軸總成(右)/長

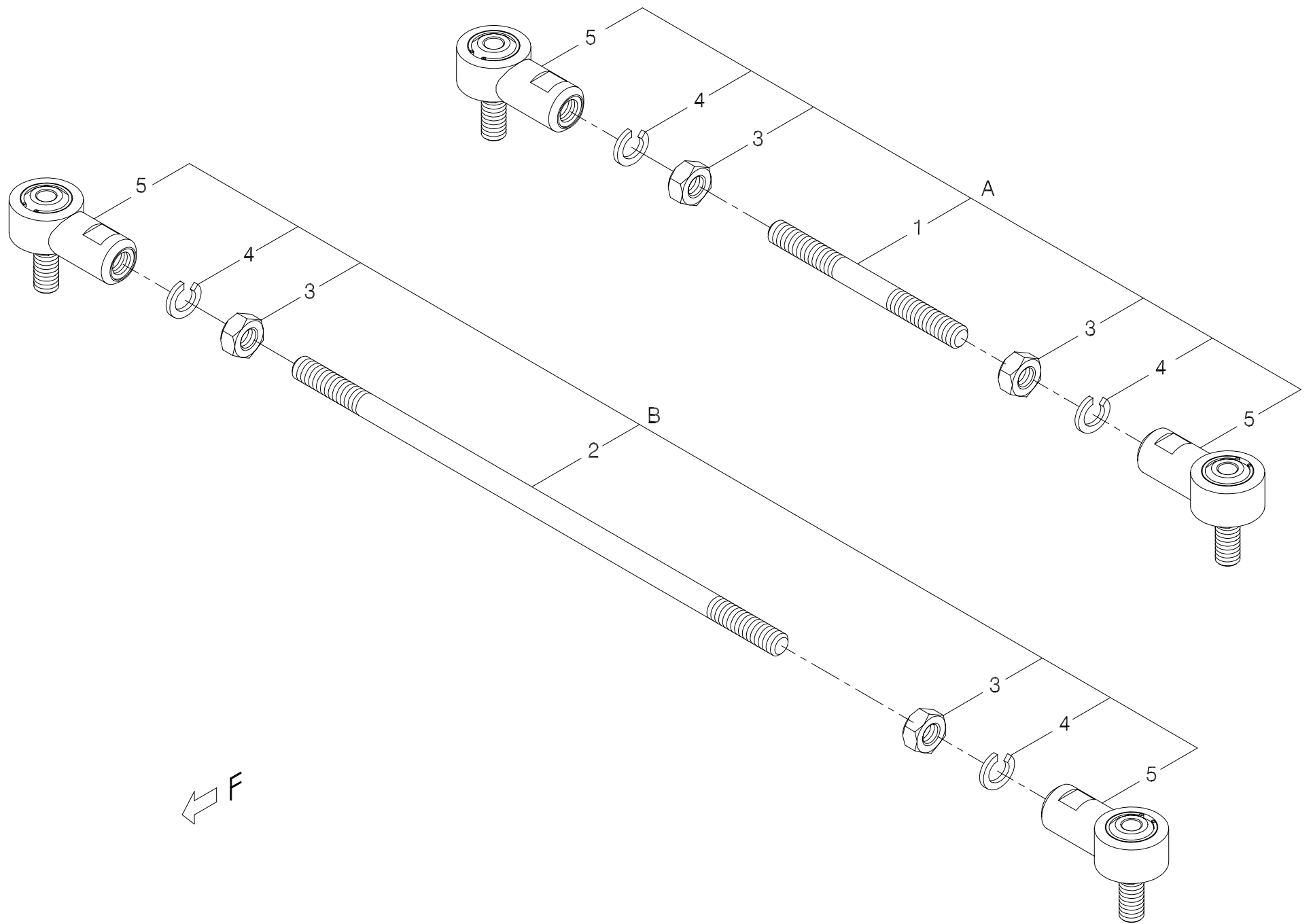


FIG.7

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
7-A	101601-88100	1	Connecting rod assembly (Short)	85L	導向連桿總成(短)/85L
7-1	201601-88101	1	Connecting rod	M8*P1.25*85L, Galvanized	導向連桿(短)/M8*P1.25*85L(五彩)
7-3	5011-08013-200	2	Nut	M8*P1.25*13, Multicolored Galvanized	六角螺帽/M8*P1.25*13邊 (五彩)
7-4	5022-08013-210	2	Spring washer	φ 8*13, Multicolored Galvanized	彈簧墊圈/ φ 8*13 (五彩)
7-5	201602-88100	2	Link ball		和尚頭
			-----*-----		
7-B	101701-88100	1	Connecting rod assembly (Long)	220L	導向連桿總成(長)/220L
7-2	201701-88101	1	Connecting rod	L, M8*P1.25*220L, Multicolor	導向連桿(長)/M8*P1.25*220L (五彩)
7-3	5011-08013-200	2	Nut	M8*P1.25*13, Multicolored Galvanized	六角螺帽/M8*P1.25*13邊 (五彩)
7-4	5022-08013-210	2	Spring washer	φ 8*13, Multicolored Galvanized	彈簧墊圈/ φ 8*13 (五彩)
7-5	201602-88100	2	Link ball		和尚頭

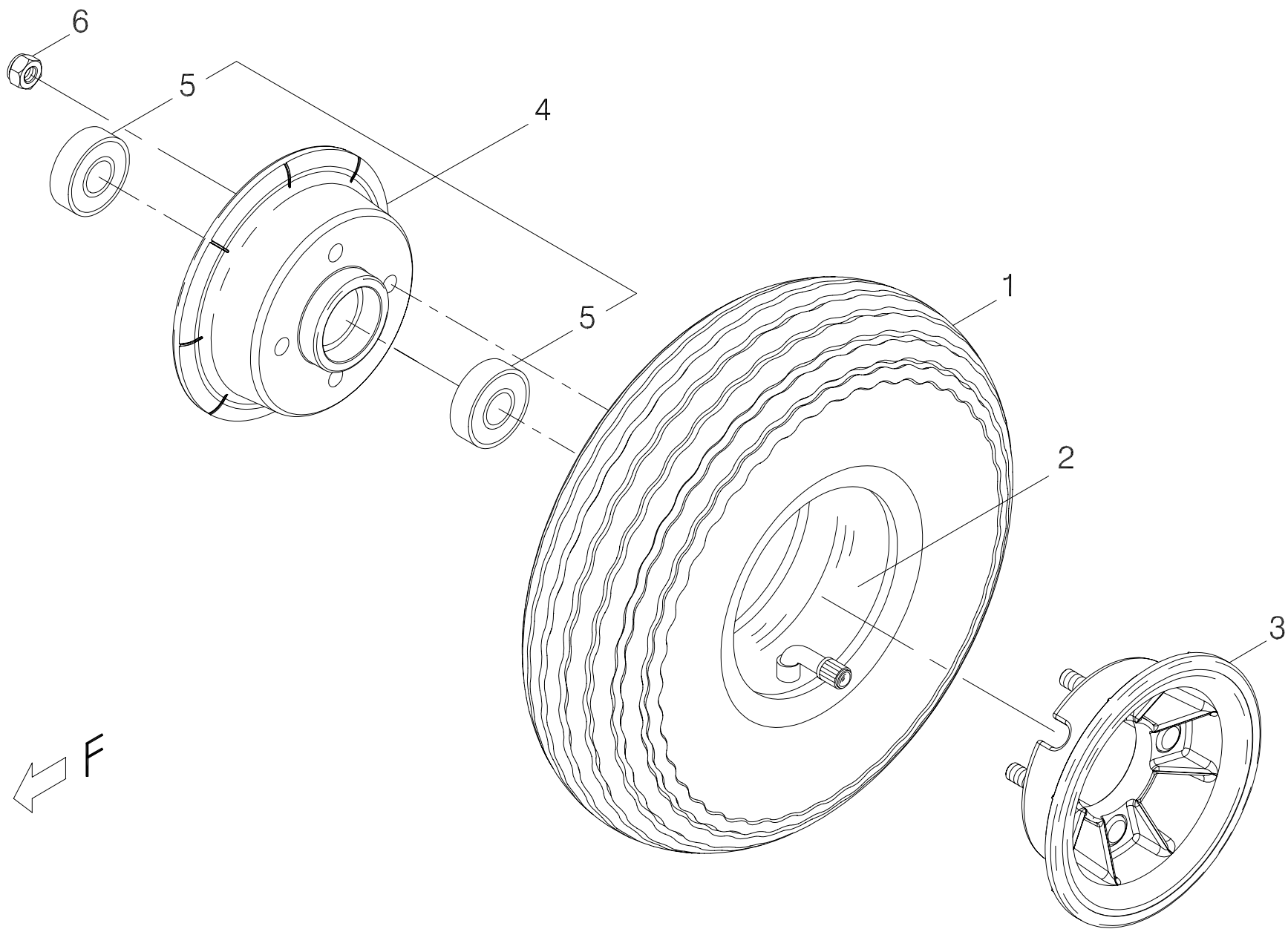


FIG.8

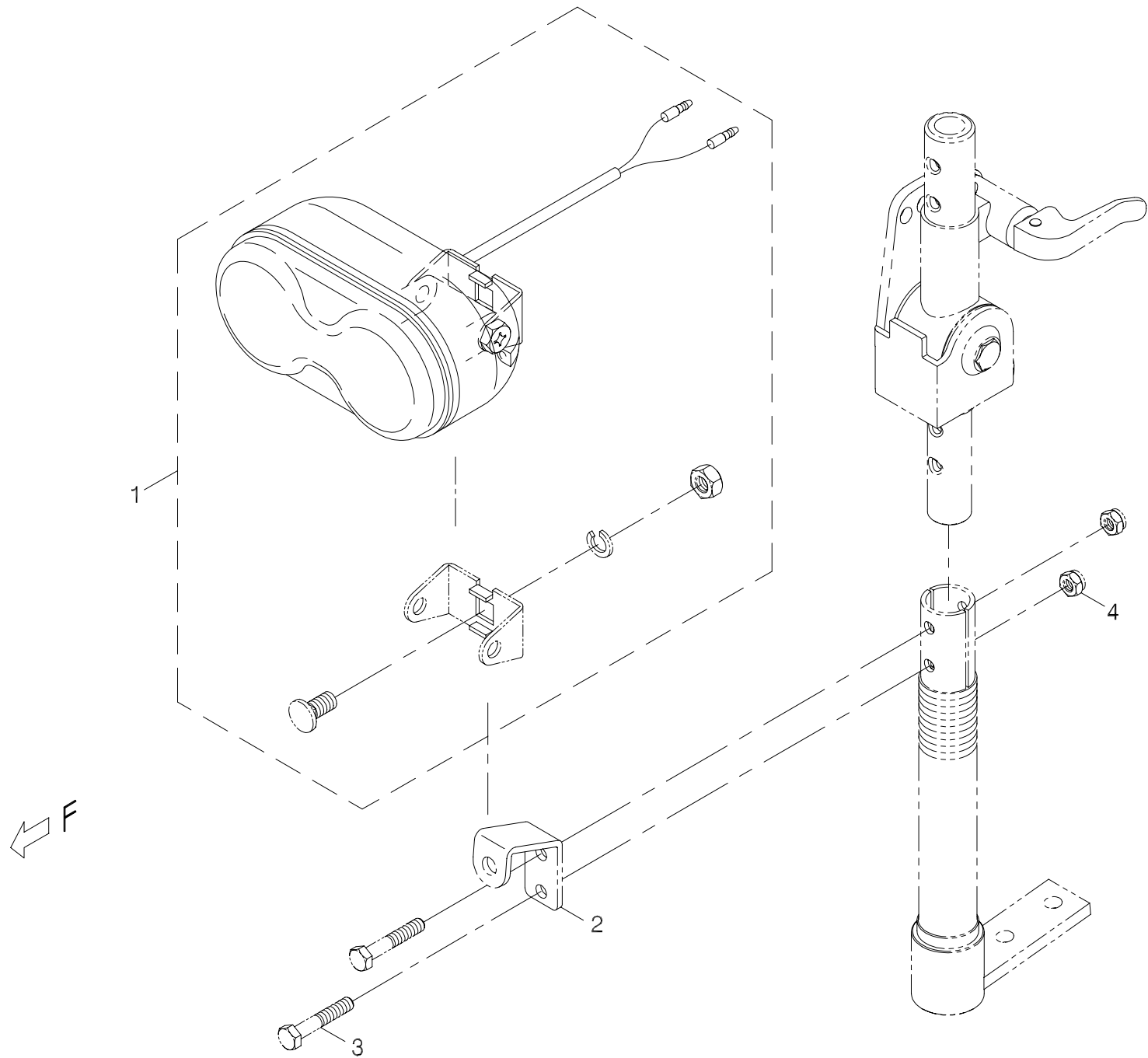


FIG.9

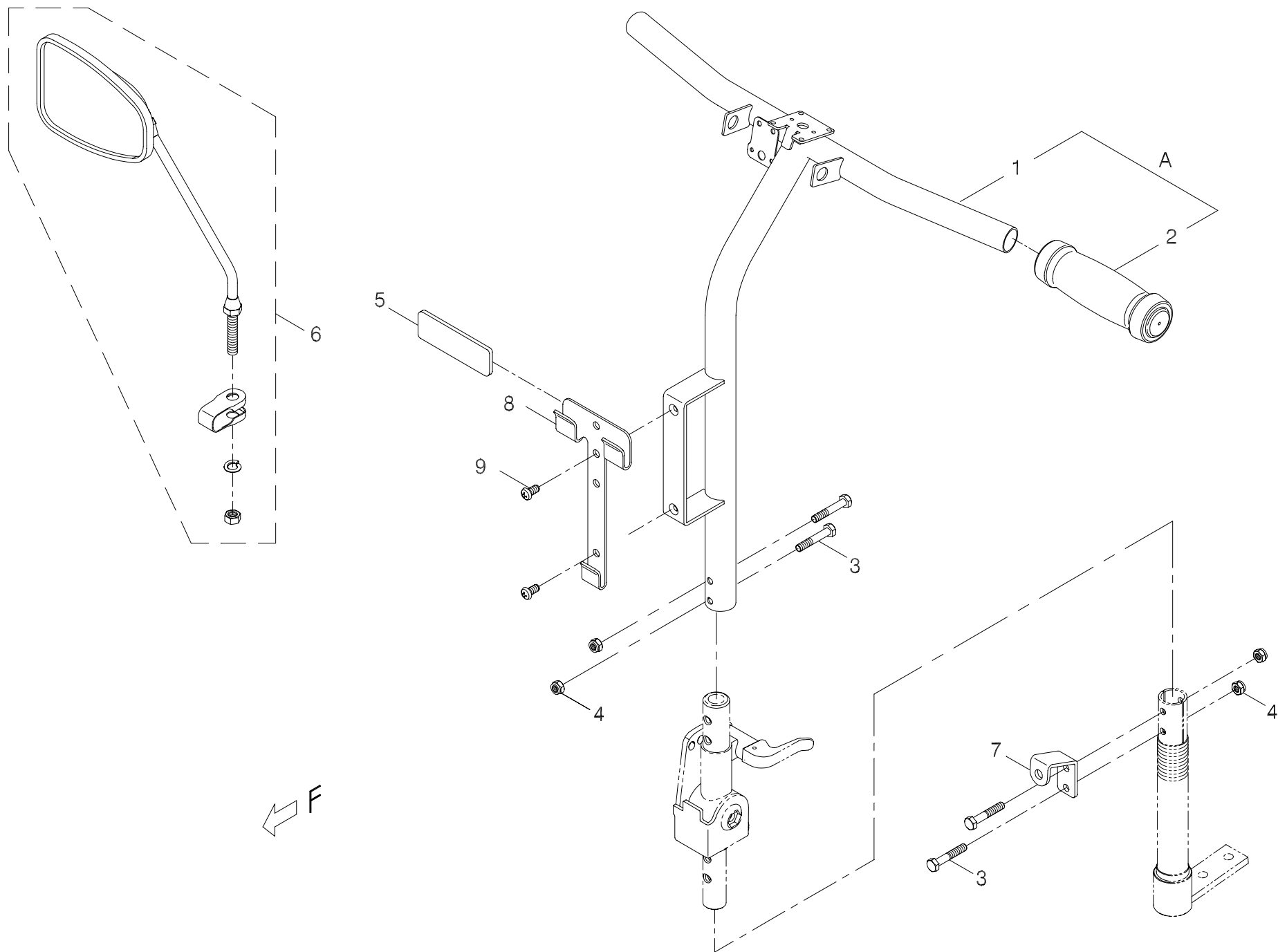


FIG.10

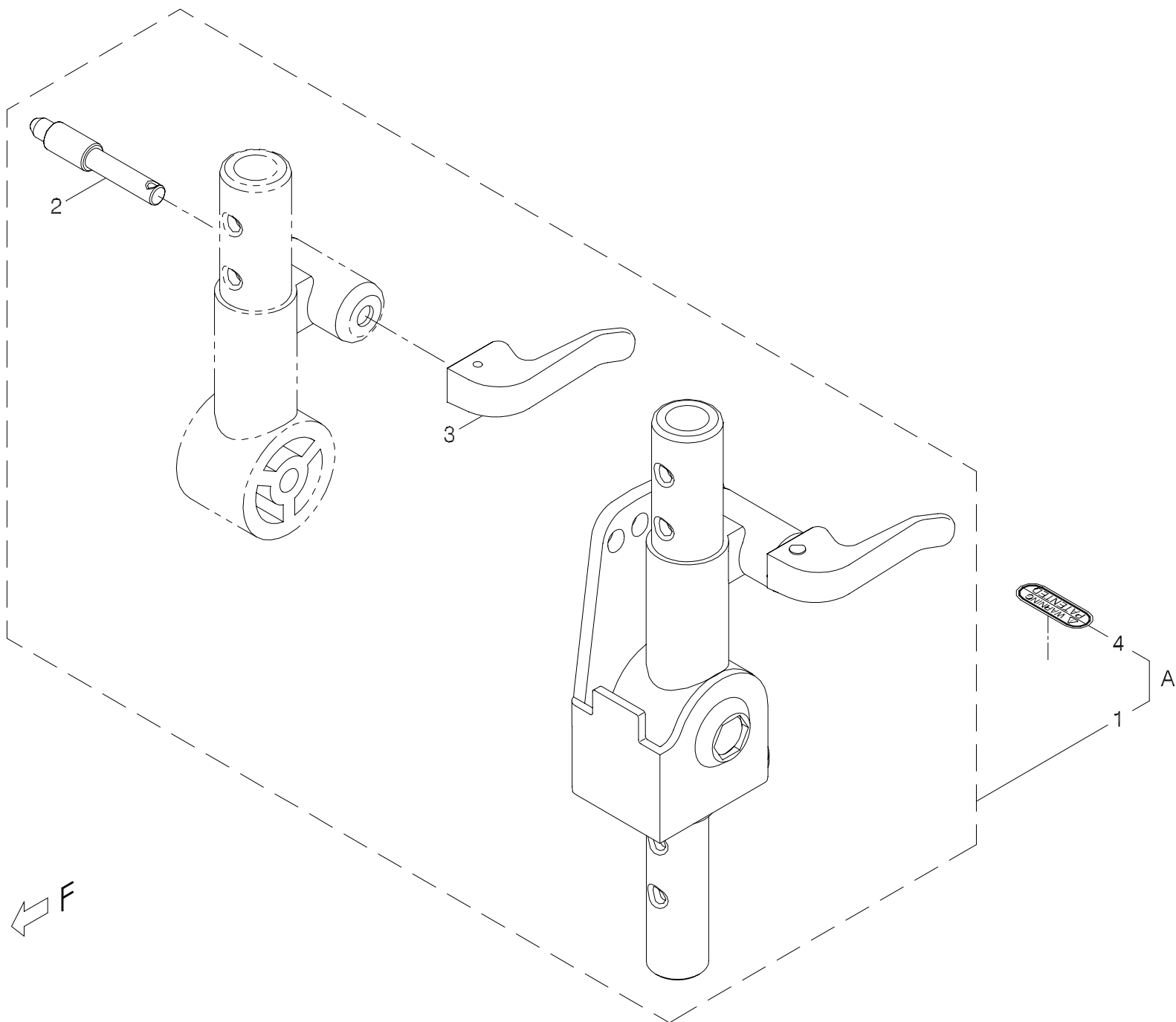


FIG.11

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
12	-----		Swivel seat, adaptor assembly		旋轉-座台，支撐座總成
12-A	800318-778-00	1	Deluxe seat assembly	Gray vinyl,L	大折疊椅模組+滑道/淺灰皮(全包覆式)/L
12-1	104014-88901	1	Captain seat assembly	Gray/Dark gray vinyl	大折疊椅總成(皮面)/淺灰中深灰邊(全包覆)
12-2	204901-88803	1	Sliding rail	L,#5	滑道(左)/#5
12-3	204902-88803	1	Sliding rail	R,#5	滑道(右)/#5
12-4	5003-08020-221	4	Allen button head screw	M8*P1.25*20L	半圓頭內六角鋼栓/M8*P1.25*20L(防鬆全支) (五彩)
12-5	5021-08022-211	4	Washer	φ 8*22*5t,Galvanized	平墊圈/ φ 8*22*5t (五彩)
12-6	204506-66101	1	Plate,seat		旋轉座台#2
12-7	204507-66103	1	Swivel seat assembly item 9153638483		旋轉台(鋁)#4
12-8	4001428-00	4	Washer	A428, φ 8.4*26*3t	平墊圈/A428 (φ 8.4*26*3t)
12-9	5012-08013-200	4	Nylon lock nut	M8*P1.25*13 7.8t,Galvanized	尼龍螺帽/M8*P1.25*13邊7.8t(五彩)
12-10	204508-88805-A2	1	Adaptor	165L	旋轉台基座#2/165L(加孔)A2
-----	300916-11		Indication label	Adjustment for backrest angle,75*38mm	座椅角度調整標示卡 / 75*38 mm
			----- * -----		
12-11	5008-10020-212-A2	2	Knob,lower arm	M10*17L,Multicolored Galvanized,A2	星型螺栓/M10*17L全牙,五彩 (A2)

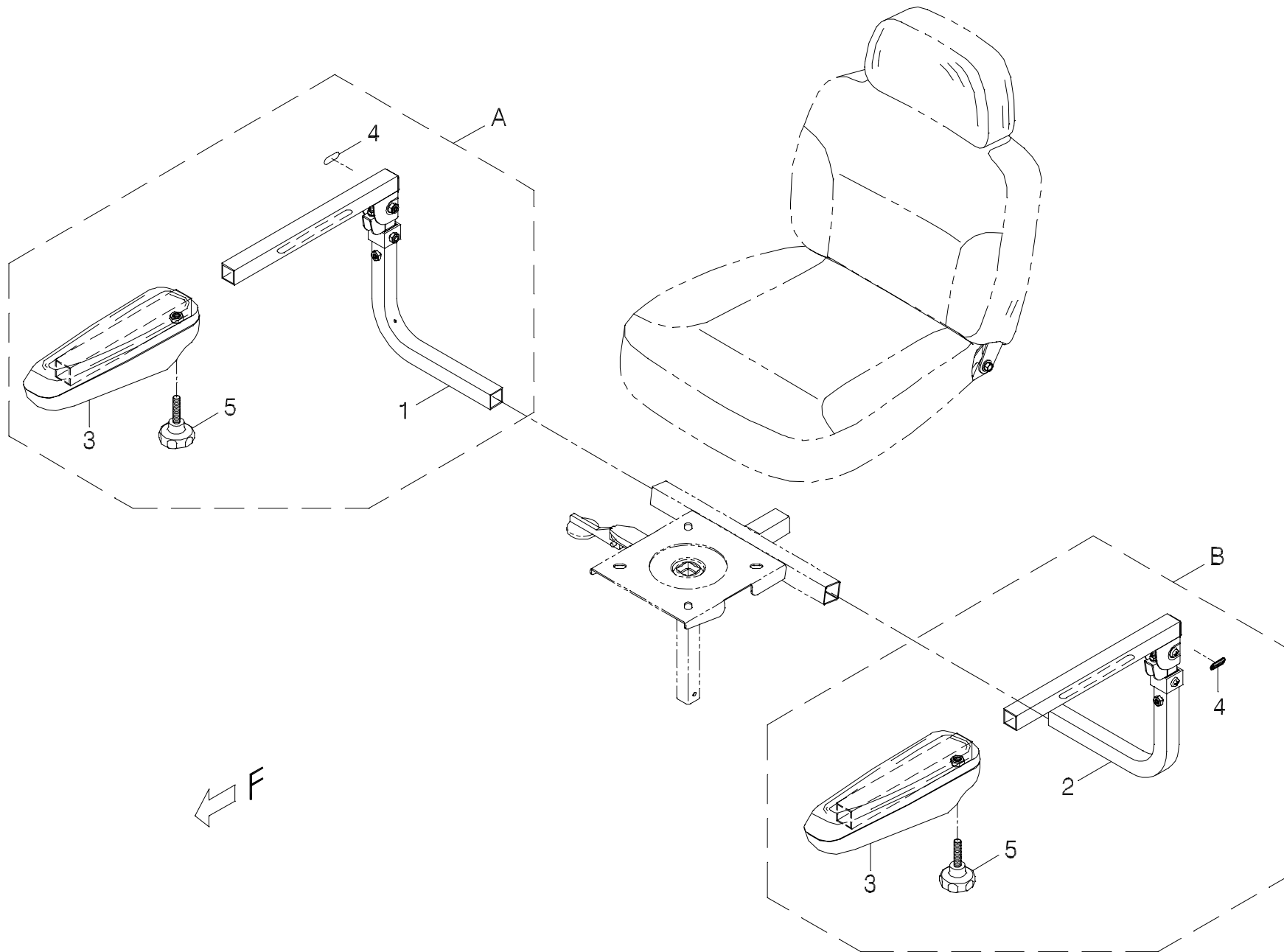


FIG.13

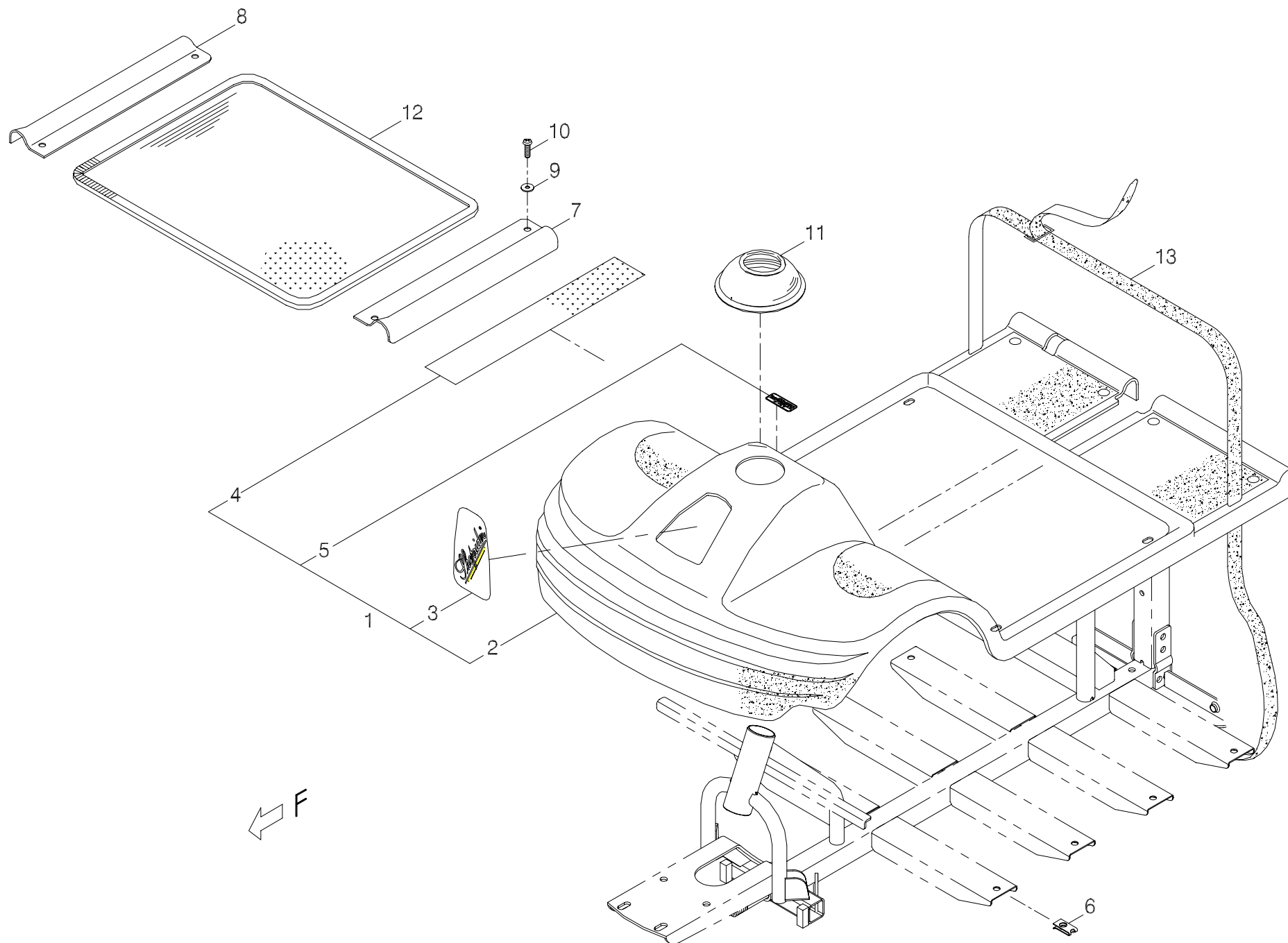


FIG.14

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
14	-----		Front chassis cover assembly		前蓋板總成
14-1	103102-88100-22	REF(1)	Front chassis cover assembly	w/decal,888,Burgundy	前蓋板總成(含貼紙)/888 棗紅
14-2	103101-88100-22	REF(1)	Front chassis cover assembly	888,Burgundy	前蓋板總成/888 棗紅
14-3	301204-00	1	Decal	T4	橢圓型貼紙/T4 (SHOPRIDER)
14-4	203103-88100	REF(1)	Velcro	50W*25M,Hook	自黏扣帶(勾面)/50W*25M
14-5	301127-03	1	Front chassis cover sticker	N27-3	前蓋貼紙/N27-3
			----- *		
14-6	202921-88100	4	U type plate nut	Close	螺絲固定片/(閉口)
14-7	203501-88100	1	Protect cover	L,888 Black	前蓋板護片(左)/888 黑
14-8	203502-88100	1	Protect cover	R,888 Black	前蓋板護片(右)/888 黑
14-9	5021-06018-440	4	Washer	φ 6*18*1.6t,SUS	平墊圈/φ 6*18*1.6t SUS
14-10	5005-06020-440	4	Screw	M6*P1.0*20L,SUS	十字圓頭螺栓/M6*P1.0*20L SUS
			----- *		
14-11	209903-88100	1	Rubber cover	A1	防塵套(前)/A1
14-12	209906-88102	1	Carpet	888	地毯(#3)/888
14-13	209920-88100	1	Fastening strap	25mmW*24A+128Bcm	電瓶固定帶(長)/25mmW*24A+128Bcm
			----- *		
14-1	103102-88100-42	REF(1)	Front chassis cover assembly	w/decal,888,Blue	前蓋板總成(含貼紙)/888 深藍
14-2	103101-88100-42	REF(1)	Front chassis cover assembly	888,Blue	前蓋板總成/888 深藍

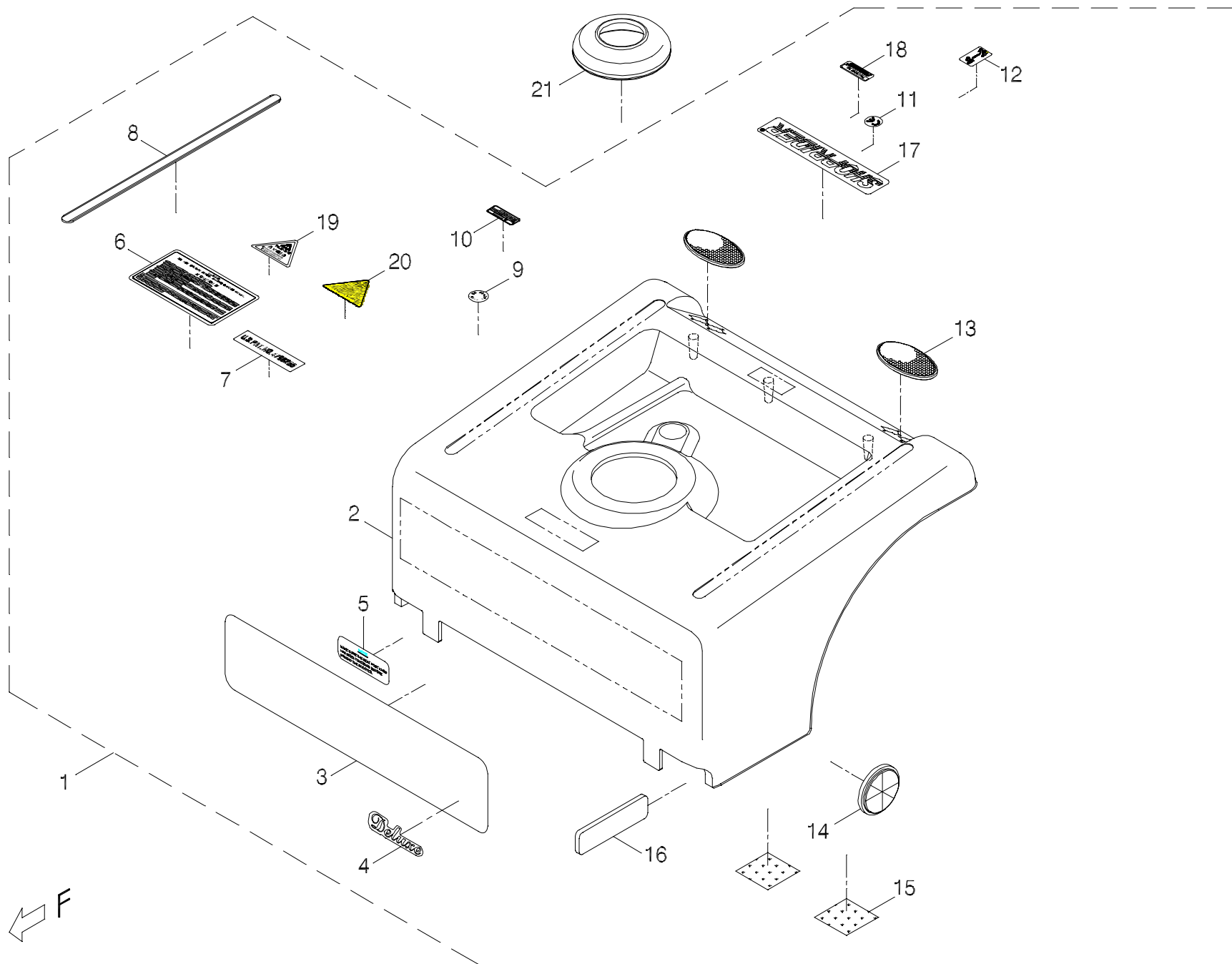


FIG.15

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
15-1	103202-88100-22	REF(1)	Rear chassis cover assembly	w/decal,888,Burgundy	後蓋板總成(含貼紙)/888 棗紅
15-2	103201-88101-22	REF(1)	Rear chassis cover assembly	888,Burgundy,With light	後蓋板總成/888 棗紅(加燈孔)
15-3	203203-88100	1	Emblem	Rear,A01,410*100	木紋紙(後)/A01 410*100
15-4	301206-00	1	Decal	T6,Deluxe	豪華型貼紙/T6 (Deluxe)
15-5	301106-00	1	Instruction sticker	N6	指示貼紙/N6 (透白)
15-6	301162-01	1	Warning sticker	N62-1	警告貼紙/N62-1 (透白)
15-7	301146-04	1	Patent sticker	N46-4,PAT NO.4798255	專利貼紙/N46-4 (PAT NO.4798255)
15-8	203202-88100	2	Striped tape	Rear,14W*336L	邊飾條(後)/14W*336L
15-9	301116-01	1	MIT sticker	N16-1	MIT貼紙/N16-1
15-10	301127-03	1	Front chassis cover sticker	N27-3	前蓋貼紙/N27-3
15-11	301166-02	1	CE Mark Label	N66-2	CE貼紙/N66-2 透白
15-12	301187-11	1	ON-BRAKE-OFF LABEL	N87-11	ON-BRAKE-OFF圖示貼紙/N87-11 (透白)
15-13	203204-66601	2	Reflector	PE-332B1,Oval,Red	反光片(紅)/PE-332B1 橢圓型凸面(大)
15-14	203205-88100-A2	2	Reflector	TF-310Y,Yellow(E1)	反光片(黃)/TF-310Y(E1)
15-15	203103-66400	1	Velcro	50W*25M,Loop	自黏扣帶(毛面)/50W*25M
15-16	301301-00	2	Sponginess decal	107*30*6t	海綿貼紙/107*30*6t
15-17	301203-00	1	Decal	T3,174*35	商標貼紙(長型)/T3 (SHOPRIDER)174*35
15-18	301179-04	1	Instruction sticker	N79-4	指示貼紙(40*15.5)/N79-4(Powered by PIHSIANG)
15-19	301123-07	1	Warning sticker	N23-7,Large	三角型警告貼紙/N23-7 (大)
15-20	301123-23	1	Warning sticker	N23-23	三角型警告貼紙/N23-23
			-----*-----		
15-21	209904-78100	1	Rubber cover	A7	防塵套(後)/A7
			-----*-----		

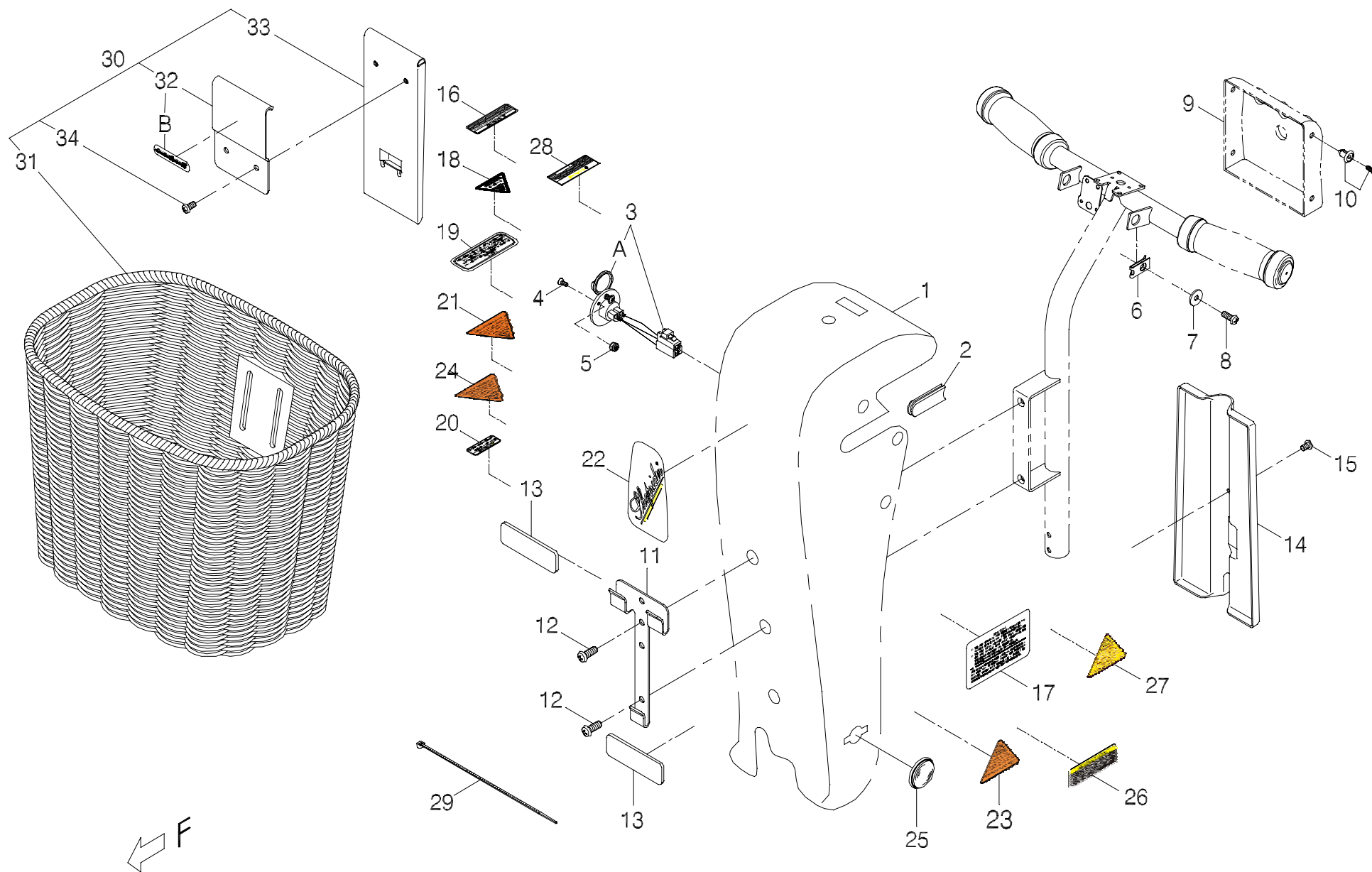


FIG.16

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
16	-----		Handle bar cover assembly		把手蓋總成
16-1	-----	REF(1)	Front tiller cover assembly	X-3-XL,Burgundy#1-1	把手上蓋總成(大)/X-3-XL 棗紅-長方口#1-1(A2)
16-2	209902-77100	1	Rubber cover		把手蓋防塵套
			-----*-----		
16-3	207006-88109	1	Charging cable	KA-888-H11	充電線(短)/KA-888-H11
16-A	-----	REF(1)	Charger inlet cover		充電機座蓋
16-4	5009-03010-440	2	Screw	M3*P0.5*10L,SUS	埋頭螺栓/M3*P0.5*10L SUS
16-5	5012-03006-200	2	Nylon lock nut	M6*P1.0*10*6t,Galvanized	尼龍螺帽/M6*P1.0*10邊*6t (五彩)
			-----*-----		
16-6	202921-88100	2	U type plate nut	Close	螺絲固定片/(閉口)
16-7	5021-06018-440	2	Washer	φ 6*18*1.6t,SUS	平墊圈/φ 6*18*1.6t SUS
16-8	5005-06016-440	2	Screw	M6*P1.0*16L,SUS	十字圓頭螺栓/M6*P1.0*16L SUS
			-----*-----		
16-9	-----	REF(1)	Rear tiller cover assembly		把手下蓋總成
16-10	209912-78500-A3	4	Stud	G3020060	腳釘/G3020060
			-----*-----		
16-11	4001151-02	1	Basket stand	A151-2	籃子掛勾/A151-2 (電著)
16-12	5005-06016-440	2	Screw	M6*P1.0*16L,SUS	十字圓頭螺栓/M6*P1.0*16L SUS
16-13	301307-00	2	Sponginess decal	75*30*6t	海綿貼紙/75*30*6t
			-----*-----		
16-14	203503-80500	1	Cable cover	888A/T-bar	電線護蓋/888A/T把
16-15	5005-04006-210	1	Screw	M4*P0.7*6L,Multicolored Galvanized	十字圓頭螺栓/M4*P0.7*6L (五彩)
			-----*-----		
16-16	301174-05	1	Warning sticker	N74-5	警告貼紙/N74-5

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
16-17	301139-02	1	Instruction sticker	N39-2	指示貼紙/N39-2 (透白)
16-18	301123-08	1	Warning sticker	N23-8,Small	三角型警告貼紙/N23-8 (小)
16-19	301131-01	1	Instruction sticker	N31-1	指示貼紙/N31-1 (透明白字)
16-20	301174-16	1	Warning sticker	N74-16	警告貼紙/N74-16
16-21	301123-16	1	Warning sticker	N23-16	三角型警告貼紙/N23-16 (大)
16-22	301204-00	1	Decal	T4	橢圓型貼紙/T4 (SHOPRIDER)
16-23	301123-14	1	Warning sticker	N23-14	三角型警告貼紙/N23-14(大)
16-24	301123-20	1	Warning sticker	N23-20,Front Panel	三角型警告貼紙/N23-20(大)
16-25	203205-78700	2	Reflector	PE-35B,Round,Yellow	反光片(黃)/PE-35B 圓型
16-26	301174-25	1	Warning label	N74-25	警示貼紙/N74-25
16-27	301123-35	1	Warning Sticker	N23-35	三角型警告貼紙/N23-35, (服務記錄卡)
16-28	301174-45-A2	1	Warning Sticker	N74-45, A2	警告貼紙/N74-45(A2)
16-29	505201-02000-50	1	Cable tie	CV-200B	束帶/CV-200B
			-----*-----		
16-30	109901-88100	1	Wicker basket assembly		籃子總成/竹籐
16-31	209916-88101	1	Basket		籃子(竹籐)
16-32	4001357-00	1	Basket stand	Front,A357	籃子掛勾(前)/A357
16-B	301173-00	REF(1)	Decal		商標貼紙 (SHOPRIDER)/N73
16-33	4001358-00	1	Basket stand	Rear,A358	籃子掛勾(後)/A358
16-34	5005-06012-440	2	Screw	M6*P1.0*12L,SUS	十字圓頭螺栓/M6*P1.0*12L SUS
			-----*-----		
16-1	-----	REF(1)	Front tiller cover assembly	X-3-XL,Blue#1-1	把手上蓋總成(大)/X-3-XL 深藍-長方口#1-1(A2)

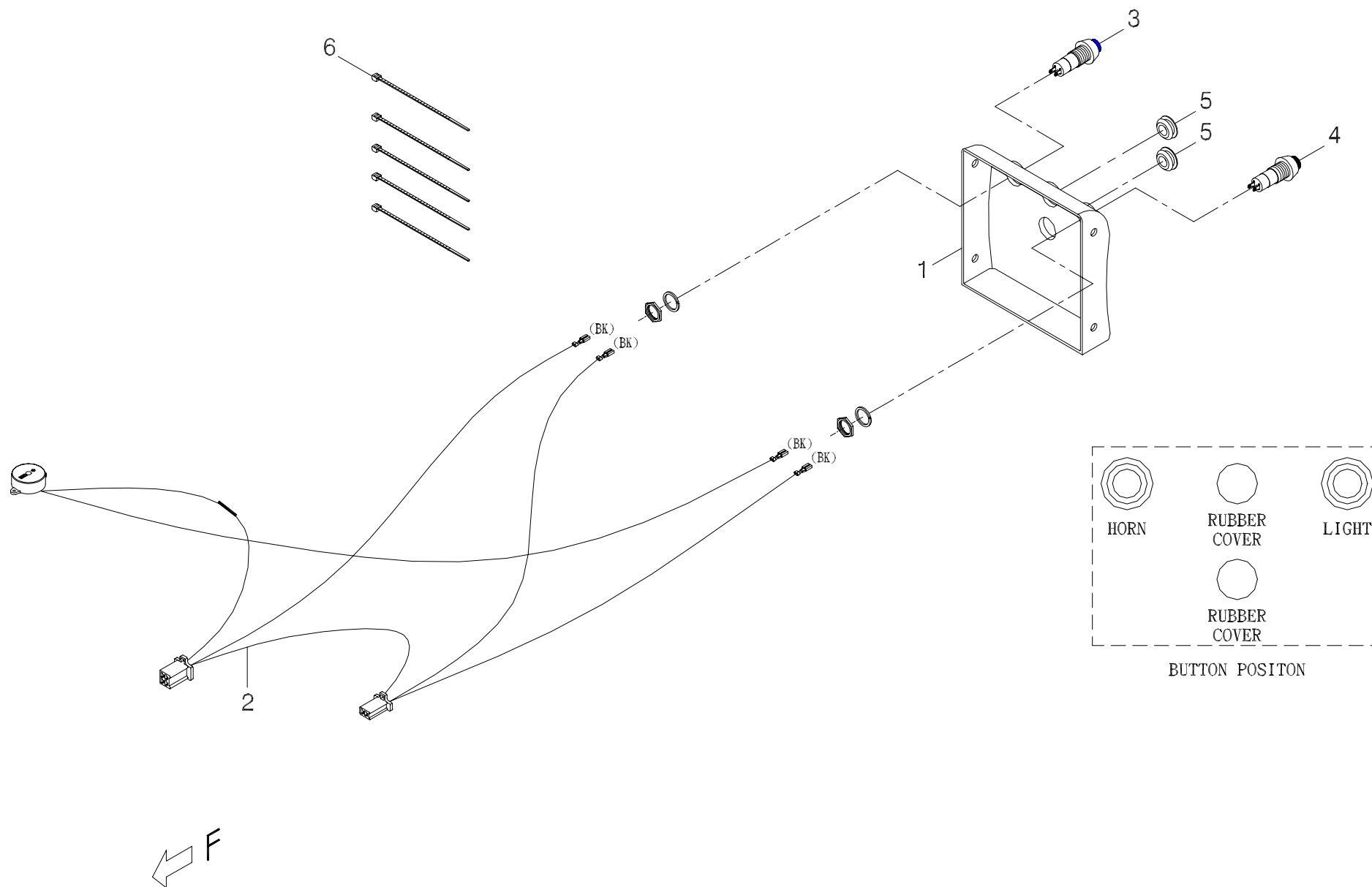


FIG.17

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
17	103403-66301-22	REF(1)	Rear tiller cover assembly	3XL,Burgundy	把手下蓋總成(含喇叭)/3XL-棗紅 (N13)
17-1	103401-66401-22	REF(1)	Rear Panel for Tiller	X-3-XL,Burgundy Red	把手下蓋總成/X-3-XL 棗紅 (四孔)
17-2	207018-89111	1	Head light cable	KA-889-N13,Horn	頭燈線/KA-889-N13 (含喇叭)
17-3	208201-88100-A2	1	Light Switch	Blue	藍色按鈕(不銹鋼彈簧)/二段式(含螺帽、平墊)A2
17-4	206105-88100-A2	1	Horn Switch	Plain Yellow Button	喇叭按鈕(不銹鋼彈簧)/黃色(含螺帽、平墊)A2
17-5	209931-66100	2	Rubber plug	φ 17	開關孔塞/φ 17
17-6	505201-00900-50	5	Cable Tie	YJ-90,Black	束帶/YJ-90(黑色)
			----- * -----		
17	103403-66301-42	REF(1)	Rear tiller cover assembly	3XL,Blue	把手下蓋總成(含喇叭)/3XL-深藍 (N13)
17-1	103401-66401-42	REF(1)	Rear Panel for Tiller	X-3-XL,Blue	把手下蓋總成/X-3-XL 深藍 (四孔)

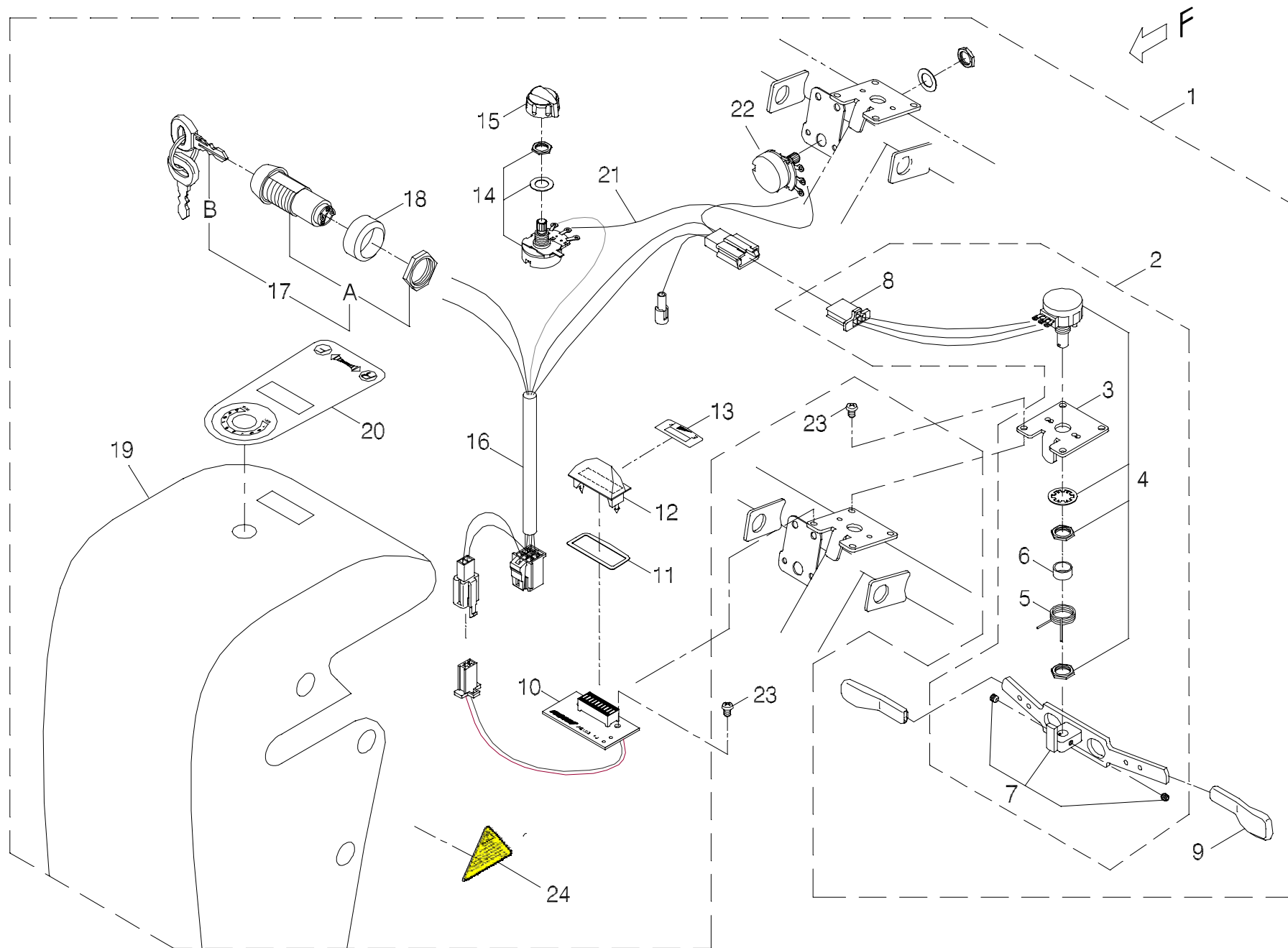


FIG.18

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
18-1	106112-80508-22-A2	REF(1)	Upper controller	888NR,Burgundy	上控制組/888NR 棗紅 HF(B10K)
18-2	106108-66403-A2	1	Potentiometer	T-bar,5K#3	搖桿電阻加工/T把(5K#3)
18-3	4001144-03	1	Potentiometer fixing plate	A144-3, ϕ 4.1	搖桿電阻固定片/A144-3 (ϕ 4.1)
18-4	206103-88103-A2	1	Potentiometer	5K#3-A2	搖桿電阻/5K#3-A2(含平墊、螺帽)
18-5	206106-88100	1	Spring		扭力彈簧
18-6	4003198-00	1	Spacer	C198	間隔圈/C198
18-7	206107-88104	1	Throttle lever	#5	加速控制桿/#5(附無頭螺栓)
18-8	207010-66402	1	Control cable	KA-889-K6	上控制線/KA-889-K6
18-9	206122-88103	2	Extension, thottle lever	PVC,Black#2	加速桿加長片/PVC (黑) #2
18-10	206114-66103-A3	1	PCB for Battery Gauge	AC LED-B1-J, A3	電量指示器PC板/AC LED-B1-J(有端子)(A3)
18-11	206128-80500	1	Gasket	□34.7*12.1*0.3T	指示燈座墊片/□34.7*12.1*0.3T
18-12	206126-88100	1	Indicator lamp	.	指示燈座/黑色
18-13	301192-00	1	Decal	N92,E,-,F	電量指示貼紙/N92 (E - F)
18-14	206109-88100-A2	1	Variable resistor	B25K(A2)	可變電阻/B25K(含平墊、螺帽)A2
18-15	206113-88101-A2	1	Speed dial knob	CF-X4-T	速率調整鈕/CF-X4-T(A2)
18-16	207010-66100	1	Control cable	KA-888-K7	上控制線(短)/KA-888-K7
18-17	106106-88103-A2	1	Asm,ignition w/keys	Delta tiller#1	鑰匙組總成(黃色)/(環把)#1
18-A	-----	REF(1)	Key switch		鑰匙座
18-B	-----	REF(1)	Keys pair		鑰匙(黃色)
18-18	4003260-00	1	Spacer	C260	鑰匙間隔圈/C260
18-19	103301-66403-22-A2	REF(1)	Front tiller cover assembly	X-3-XL,Burgundy#1-1	把手上蓋總成(大)/X-3-XL 棗紅-長方口#1-1(A2)
18-20	301220-02	1	Decal	T20-2(Wood-Grainlike Texture)	上控制貼紙/T20-2(核桃木紋)
18-21	207012-66200	1	Cable	KA-888-G5	跳線/KA-888-G5
18-22	206109-66800-A2	1	Variable resistor	B10K(A2)	可變電阻/B10K(含平墊、螺帽)A2

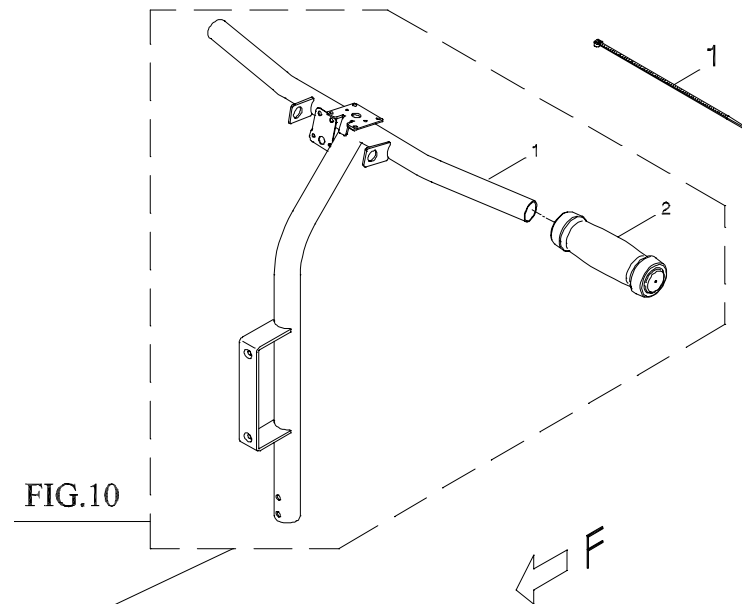


FIG.10

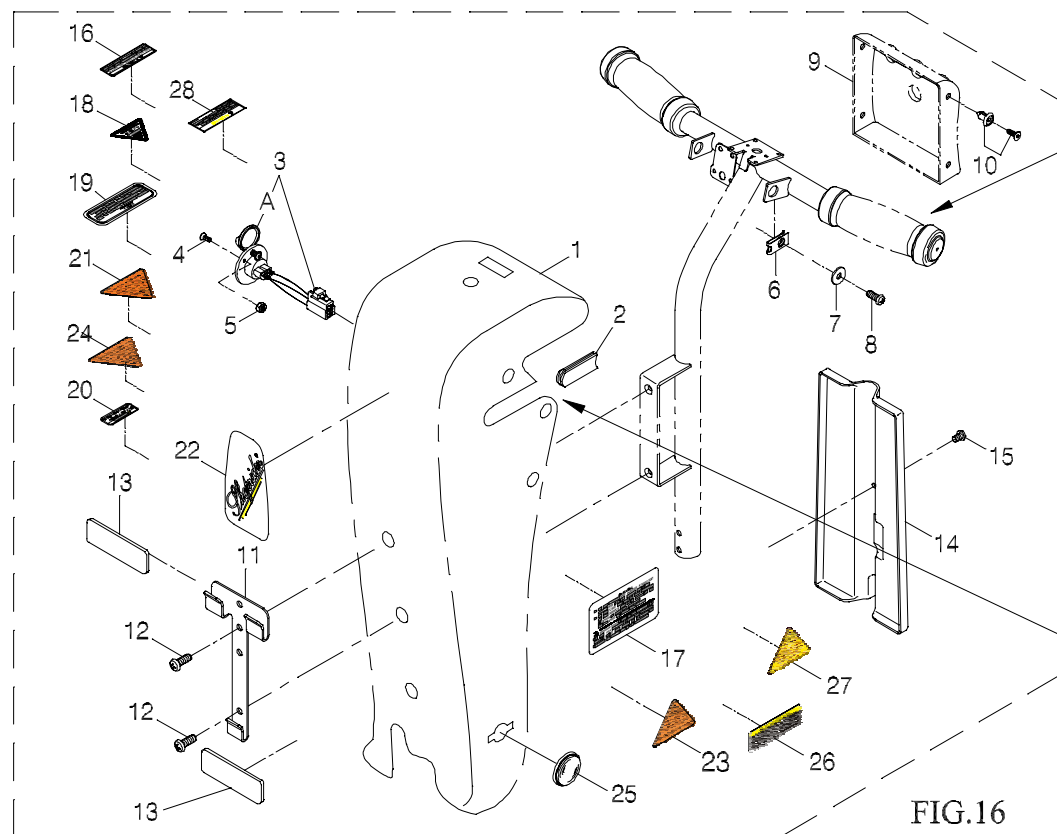


FIG.16

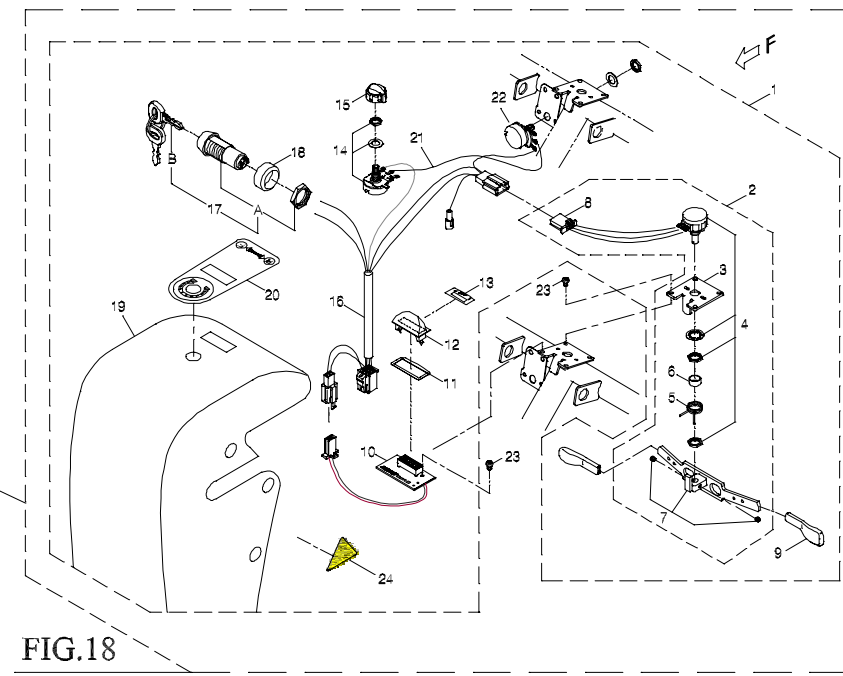


FIG.18

FIG.19

19	103601-80520-22-A2	REF(1)	Handle bar assembly	888NR,Burgundy	把手總成(大)/888NR 棗紅 HF(B10K)/SHOPRIDER
10	-----	REF	Handle bar + hand grip assembly	X-3XL#1-1	T型把手+握把套 總成/X-3XL#1-1 (無SHOPRIDER)
16	-----	REF	Handle bar cover assembly		把手蓋總成
18	-----	REF	Upper controller	888NR,Burgundy	上控制組/888NR 棗紅 HF(B10K)
19-1	505201-02000-50	1	Cable tie	CV-200B	束帶/CV-200B
			----- *		
19	103601-80520-42-A2	REF(1)	Handle bar assembly	888NR,Blue	把手總成(大)/888NR 深藍 HF(B10K)/SHOPRIDER
16	-----	REF	Handle bar cover assembly		把手蓋總成
18	-----	REF	Upper controller	888NR,Blue	上控制組/888NR 深藍HF(B10K)
17	-----	REF	Rear tiller cover assembly	3XL,Blue	把手下蓋總成(含喇叭)/3XL-深藍 (N13)
18	-----	REF	Upper controller	888NR,Blue	上控制組/888NR 深藍HF(B10K)

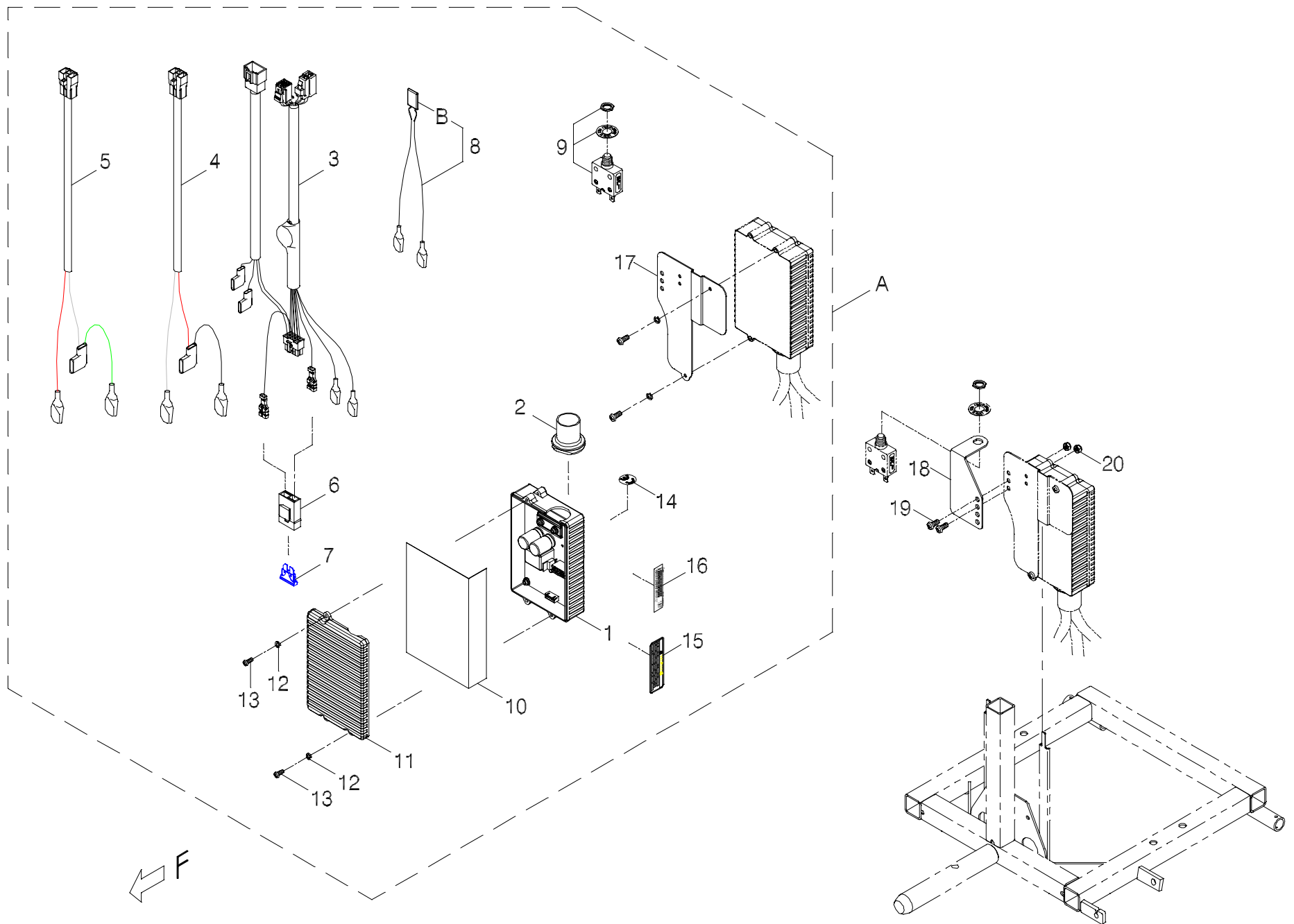


FIG.20

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
20-A	106202-88401-A3	1	Main control box ass'y	(AC2-70)888NR	下控制總成(T把)含固定片配件/(AC2-70)888NR
20-1	206221-88800-A2	1	Controller	AC2-70	控制器/C2-70(含盒)
20-2	206210-88100	1	Protection		護套(O)型環
20-3	207005-88109	1	Main control cable	KA-888-J15	主控制線/KA-888-J15
20-4	207003-88104	1	Power cable	+,KA-888-D4	電源線(正)/KA-888-D4
20-5	207004-88103	1	Power cable	-,KA-888-E3	電源線(負)/KA-888-E3
20-6	206206-88101	1	Fuse housing		保險絲座/盒式
20-7	206901-88100	1	Fuse	2A	保險絲 (盒式)/2A
20-8	107014-88100	1	Connection cable	KA-888-L6	連接線/KA-888-L6(J9)委外
20-B	206903-88100	1	Fuse	RLD30P500U	自動回復保險絲/RLD30P500U
20-9	206207-88100	1	Circuit breaker	30A	安全開關/30A(含平墊、螺帽)
20-10	302002-01	1	Insulator	127*129m/m*0.25t	絕緣膠片/127*129m/m*0.25t
20-11	206209-77200-A2	1	Control box cover	UL8A/B	下控制盒蓋/UL8A/B(A2)
20-12	5022-04007-210	4	Spring washer	φ 4*7*1.25t,Multicolored galvanized	彈簧墊圈/φ 4*7*1.25t (五彩)
20-13	5005-04010-210	4	Screw	M4*P0.7*10L,Multicolored galvanized	十字圓頭螺栓/M4*P0.7*10L (五彩)
20-14	301166-02	1	CE mark label	N66-2	CE貼紙/N66-2 透白
20-15	301174-17	1	Warning sticker	N74-17	警告貼紙/N74-17
20-16	-----	REF(1)	Decal		條碼貼紙
-----	505201-00900-50	3	Cable Tie	YJ-90,Black	束帶/YJ-90(黑色)
-----	505201-01500-50	1	Cable tie	CV-150B	束帶/CV-150B
20-17	4001383-08-A2	1	Adaptor Bracket	A383-8	控制固定片/A383-8(A2)
			-----*-----		
20-18	4001326-07-A2	1	Bracket	A326-7	安全開關固定片/A326-7(A2)
20-19	5005-05012-210	2	Screw	M5*12L,Multicolored Galvanized	十字圓頭螺栓/M5*12L (五彩)

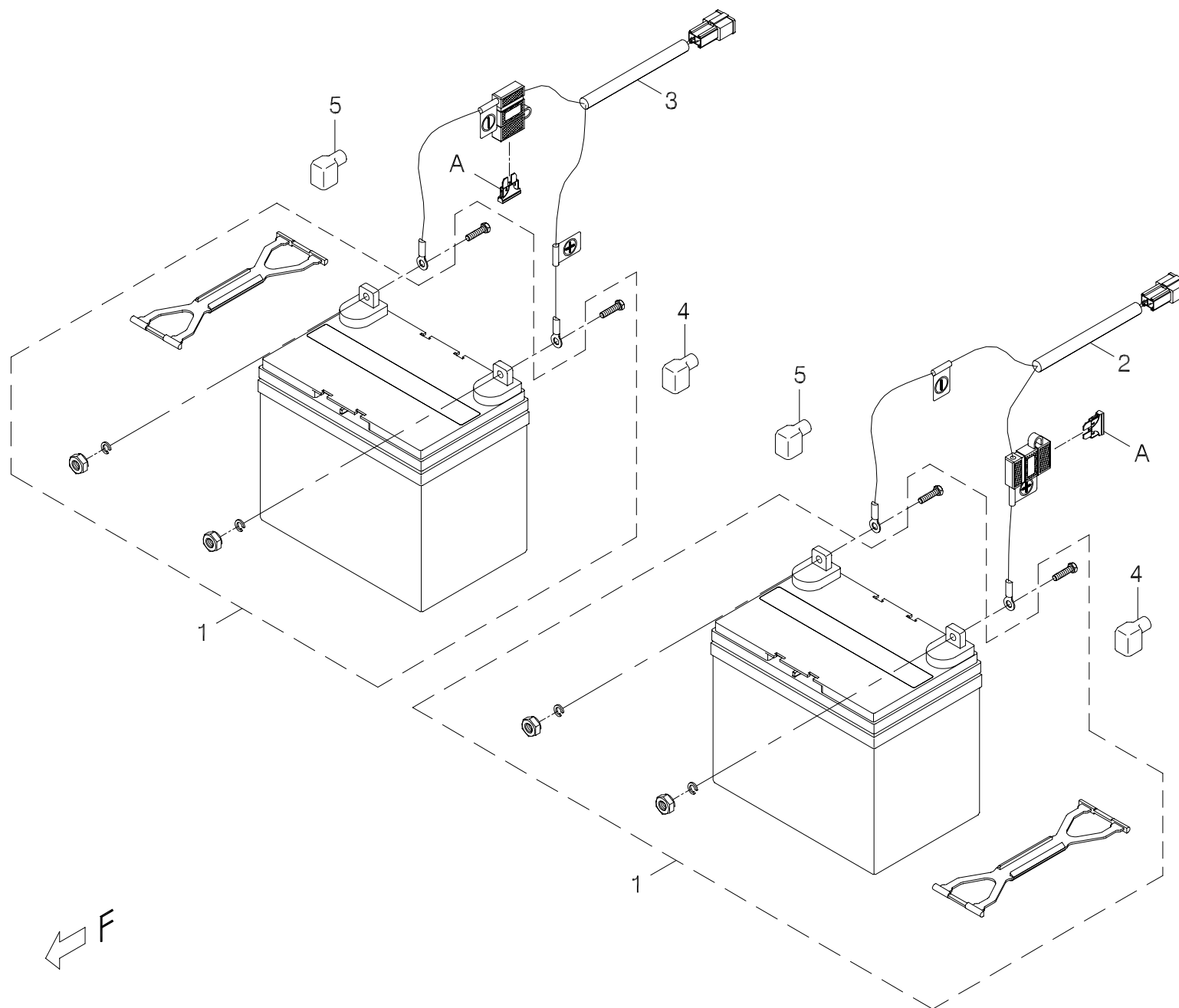


FIG.21


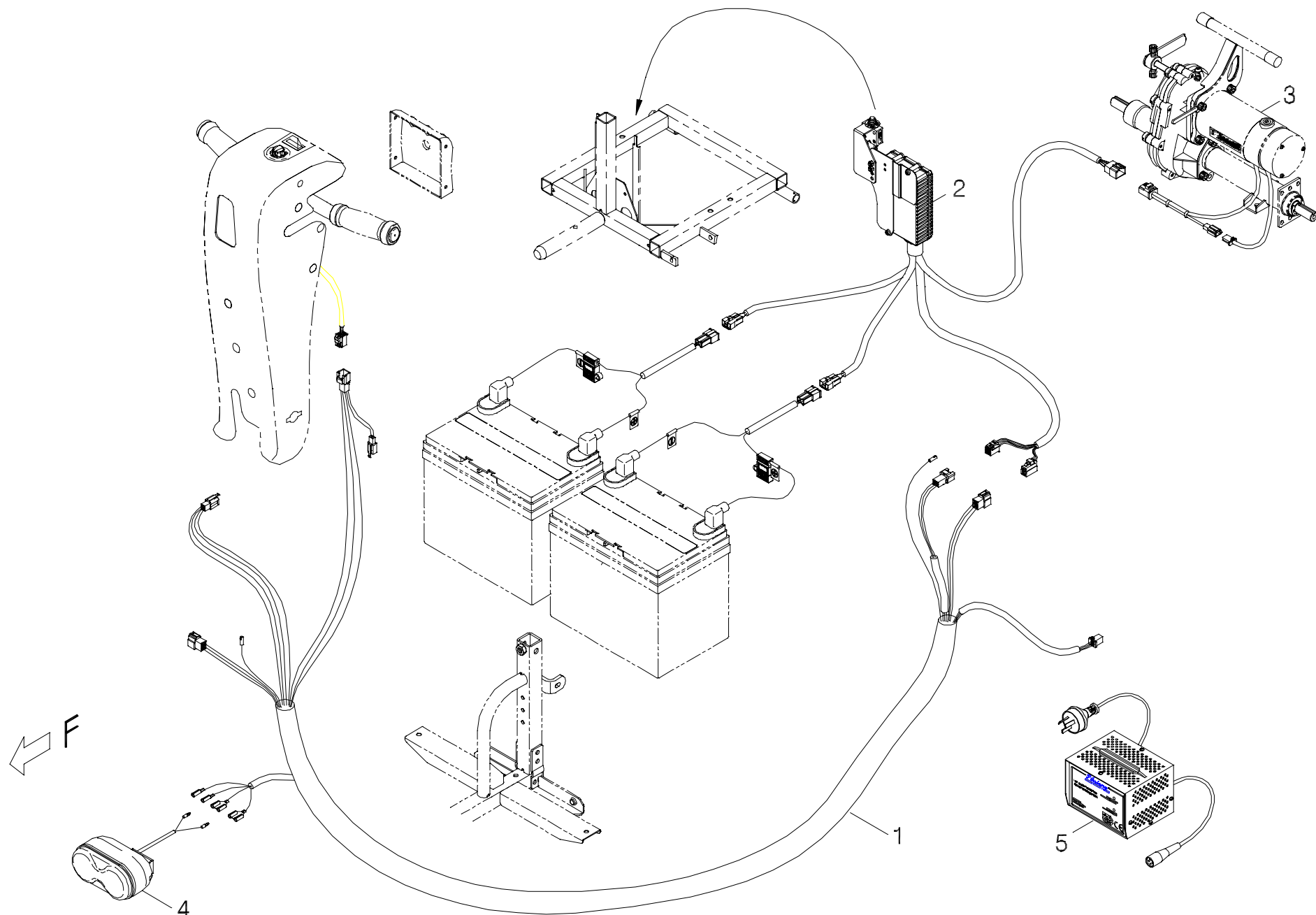


FIG.22

圖 號 FIG. & Index NO.	件 號 Part NO.	單位用量 Qty.	零 件 名 稱 Description	零 件 規 格 Specification	說 明 Remark
22	-----		Control and battery wiring illustration		控制及電瓶導線總成
22-1	207027-88104	1	Control connection cable assembly	KA-888-W4	控制線(總成)/KA-888-W4
			-----*-----		
22-2	-----	REF(1)	Main control assembly		下控制模組
			-----*-----		
22-3	-----	REF(1)	Drive-train assembly		馬達剎車變速箱總成
			-----*-----		
22-4	-----	REF(1)	Head light assembly		眼鏡燈總成
			-----*-----		
23-5	109201-88310-A2	1	Charger assembly	#3-10 24V/3A,240/Australia	充電機總成(鉛酸) ML3(含說明書)/#3-10 24V/3A PIHSIANG 240/紐澳
			-----*-----		
-----	505201-00900-50	REF	Cable Tie	YJ-90,Black	束帶/YJ-90(黑色)
-----	505201-01200-50	REF	Cable tie	CV-120B	束帶/CV-120B
-----	505201-01500-50	REF	Cable tie	CV-150B	束帶/CV-150B
-----	505201-02000-50	REF	Cable tie	CV-200B	束帶/CV-200B

Wiring Diagram for TE-888NR

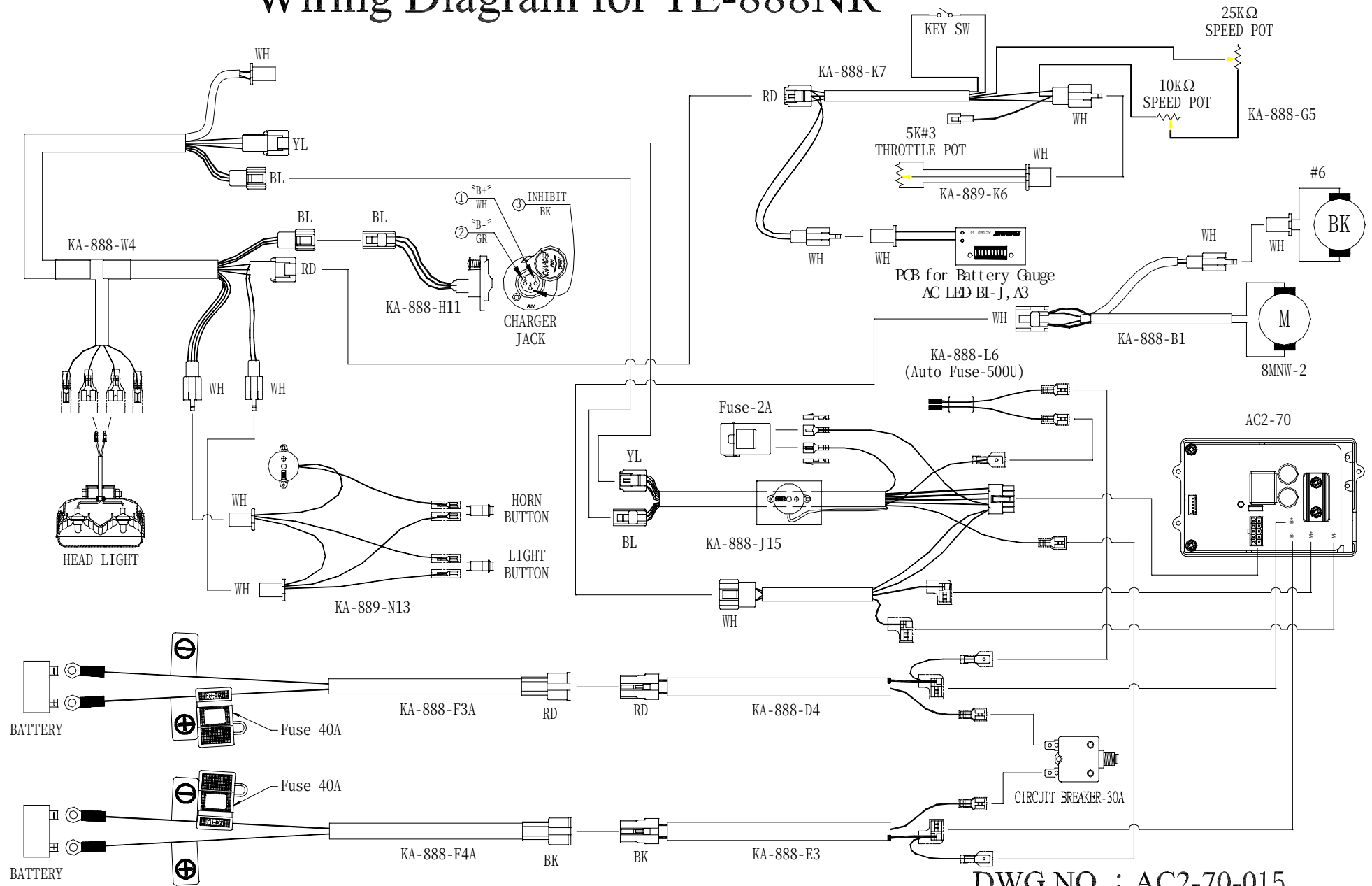

DWG NO. : AC2-70-015
EDITION : A1